


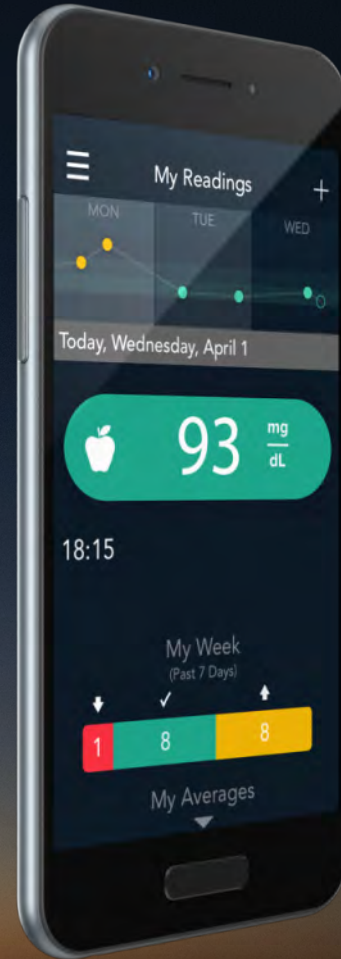

# Contour™ next ONE»

نظام مراقبة جلوكوز الدم

اقتران جهاز القياس الذكي  
CONTOUR®NEXT ONE  
ق طبيتد CONTOUR™DIABETES




Contour™  
next ONE®

نظام مراقبة جلوكوز الدم

أقرن جهاز القياس **CONTOUR®NEXT ONE**  
وسيتراف مع تطبيق **CONTOUR DIABETES App**

حينما يتوفر اتصالاً عن طريق البلوتوث

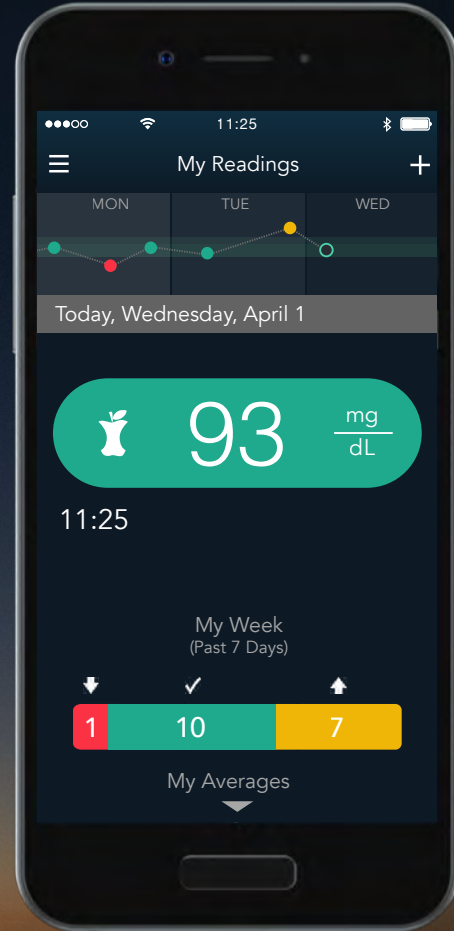

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>TM</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

## اقتران جهاز القياس

قبل أن تقرر جهاز القياس  
**CONTOUR®NEXT ONE**  
شغل البلوتوث في جهازك الجوال.

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "البلوتوث" واضغط على "زر  
التبديل" لتشغيل البلوتوث




Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

### اقتران جهاز القياس

قبل أن تقررن جهاز القياس **CONTOUR®NEXT ONE**.  
شغل البلوتوث في جهازك الجوال.

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "البلوتوث" واضغط على "زر التبديل"  
لتشغيل البلوتوث.

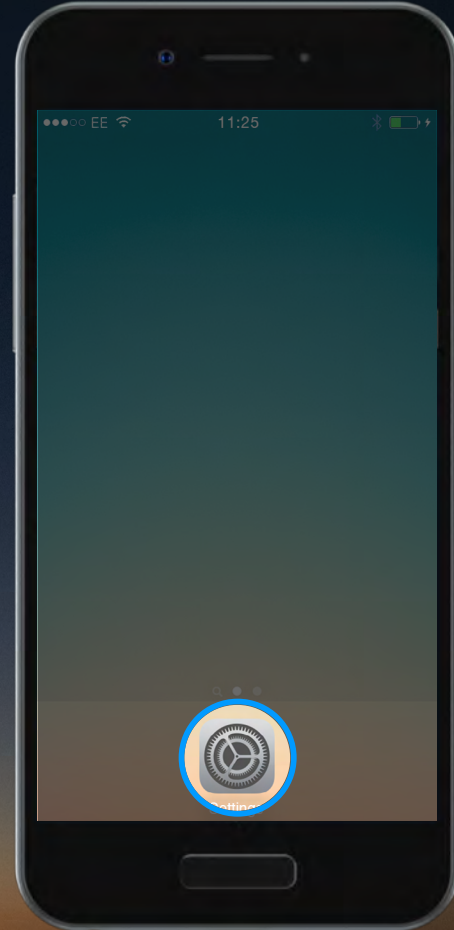


Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

### اقتزان جهاز القياس

قبل أن تقرر جهاز القياس **CONTOUR®NEXT ONE**.  
شغل البلوتوث في جهازك الجوال.

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "البلوتوث" واضغط على "زر التبديل"  
لتشغيل البلوتوث.

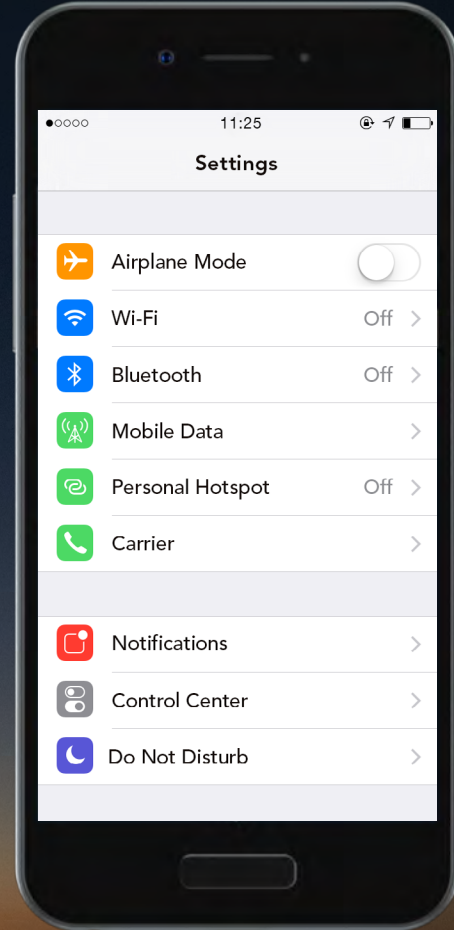

Contour™  
next ONE®


نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

### اقتران جهاز القياس

قبل أن تقرر جهاز القياس **CONTOUR®NEXT ONE**.  
شغل البلوتوث في جهازك الجوال.

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "البلوتوث" واضغط على "زر التبديل"  
لتشغيل البلوتوث.

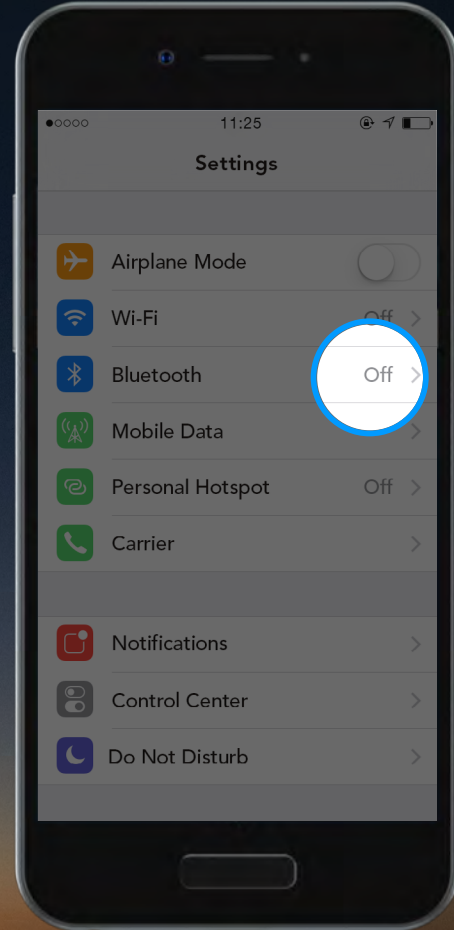

Contour™  
next ONE®


نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

### اقتران جهاز القياس

قبل أن تقرن جهاز القياس **CONTOUR®NEXT ONE** .  
شغّل البلوتوث في جهازك الجوال.

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "البلوتوث" واضغط على "زر التبديل"  
لتشغيل البلوتوث.

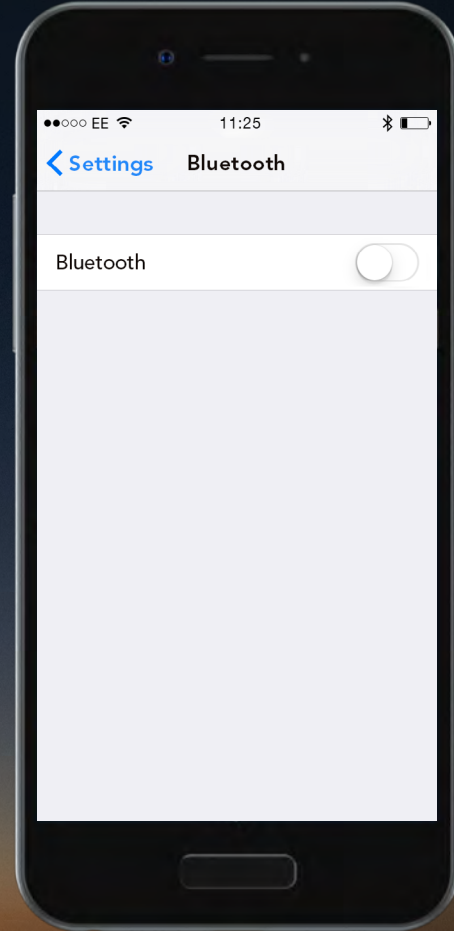

Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة جلوكوز الدم




1.

### اقتران جهاز القياس

قبل أن تقرن جهاز القياس **CONTOUR®NEXT ONE** .  
شغّل البلوتوث في جهازك الجوال.

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "البلوتوث" واضغط على "زر التبديل"  
لتشغيل البلوتوث.

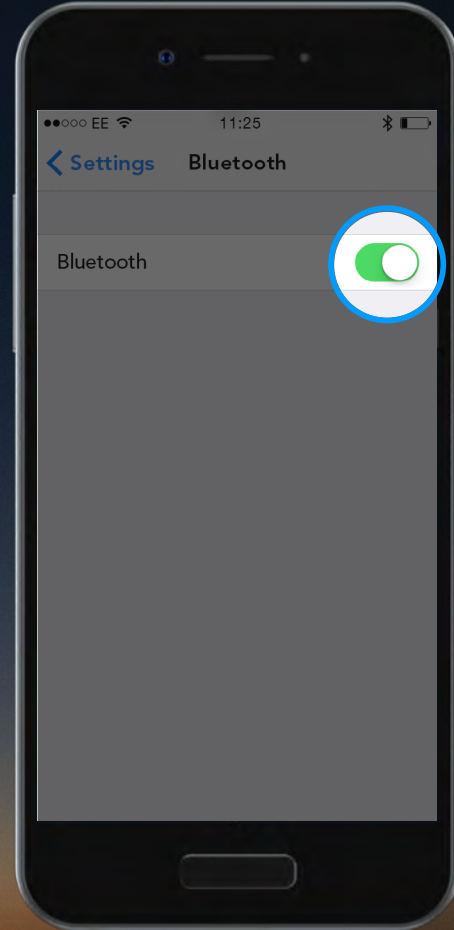

Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة جلوكوز الدم


2.

### اقتران جهاز القياس

بعد أن تنشئ حساباً على تطبيق  
**CONTOUR™ DIABETES**  
سيطلب منك إقران جهاز القياس بالتطبيق.

أنت الآن جاهز لإقران جهاز القياس.  
أغلق جهاز القياس وأبقه جانب جهازك الجوال.

اختر "متابعة".

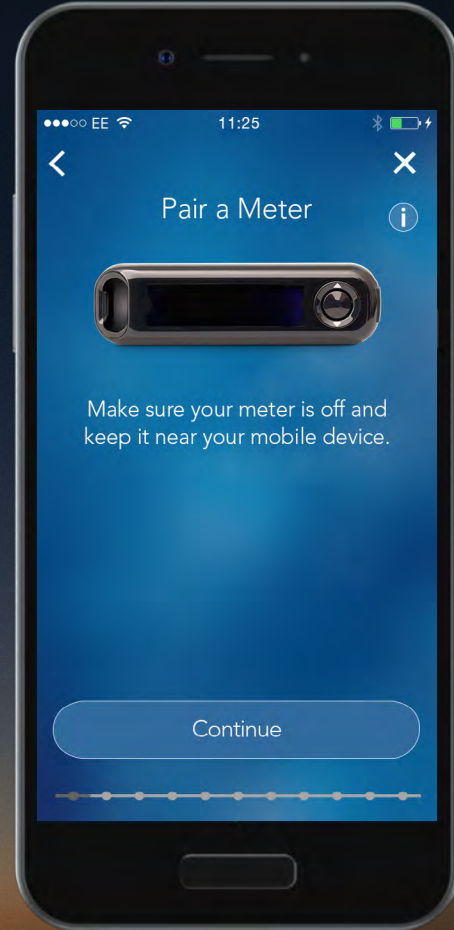

Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة جلوكوز الدم


2.

### اقتران جهاز القياس

بعد أن تنشئ حساباً على تطبيق  
**CONTOUR™ DIABETES**  
سيُطلب منك إقران جهاز القياس بالتطبيق.

أنت الآن جاهز لإقران جهاز القياس.  
أغلق جهاز القياس وأبقه جانب جهازك الجوال.

اختر "متابعة".

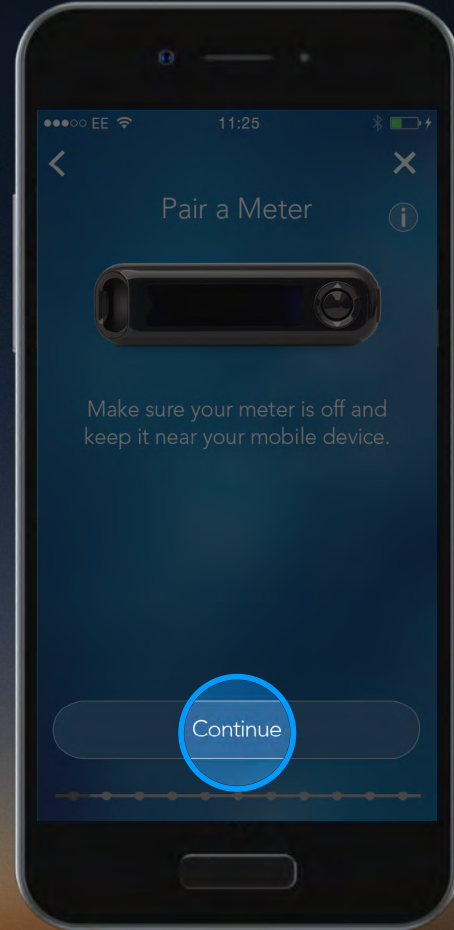

Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.


### اقتران جهاز القياس

اضغط باستمرار على الزر الأوسط بجهاز القياس

### CONTOUR®NEXT ONE

ولا تحرر الزر حتى ترى وميض باللون الأزرق

اختر "متابعة".

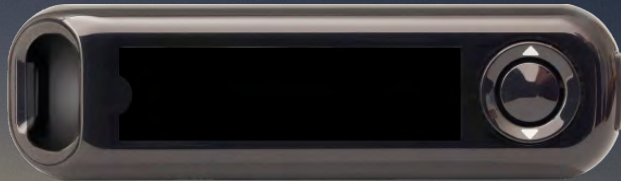

Contour™  
next ONE®

نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.

### اقتران جهاز القياس

اضغط باستمرار على الزر الأوسط بجهاز القياس

### CONTOUR®NEXT ONE

ولا تحرر الزر حتى ترى وميض باللون الأزرق

اختر "متابعة".



Contour™  
next ONE®

نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.



### اقتران جهاز القياس

اضغط باستمرار على الزر الأوسط بجهاز القياس

### CONTOUR®NEXT ONE

ولا تحرر الزر حتى ترى وميض باللون الأزرق

اختر "متابعة".

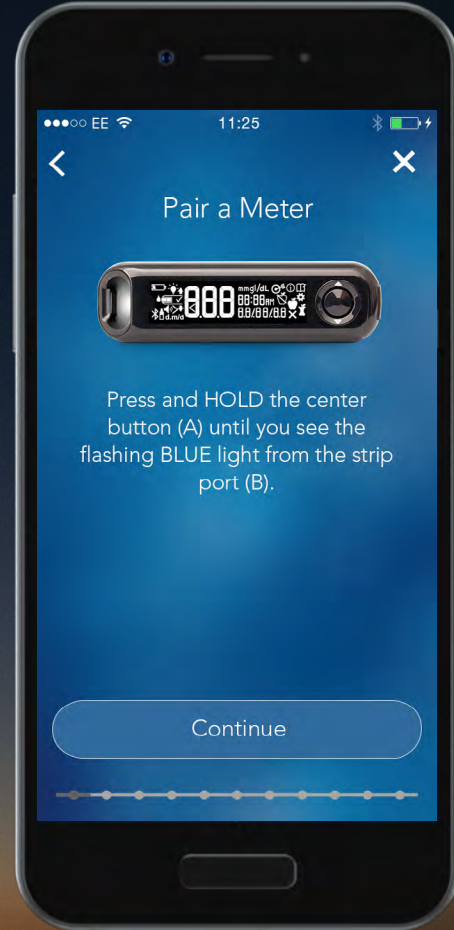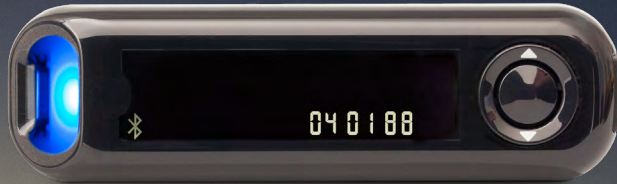

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.


### اقتان جهاز القياس

اضغط باستمرار على الزر الأوسط بجهاز القياس

### CONTOUR®NEXT ONE

ولا تحرر الزر حتى ترى وميض باللون الأزرق

اختر "متابعة".

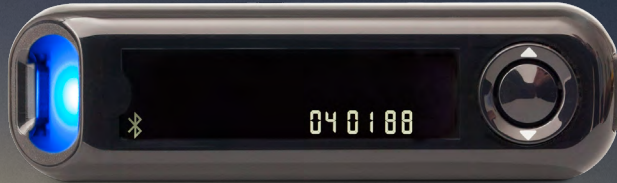

Contour™  
next ONE®

نظام مراقبة جلوكوز الدم



4.

#### اقتران جهاز القياس

حدد الرقم التسلسلي لجهاز القياس.

يمكنك إيجاد الرقم التسلسلي على الملصق  
الموجود على ظهر جهاز القياس.

اختر "متابعة".

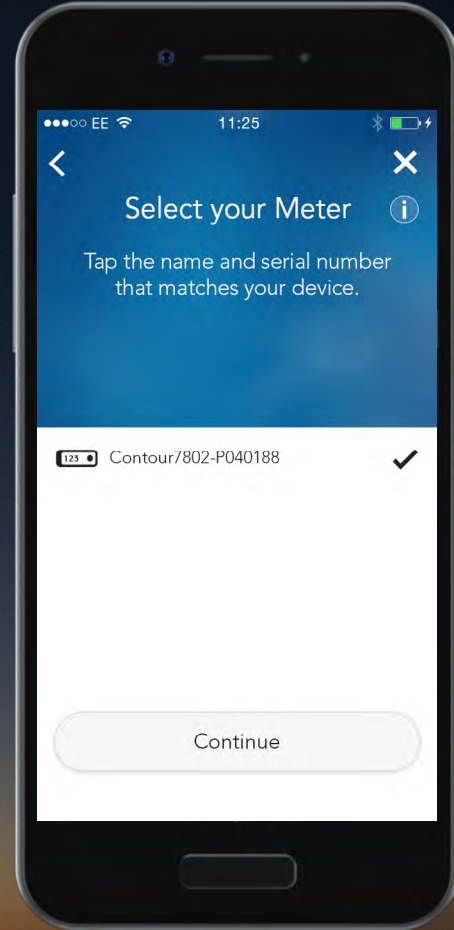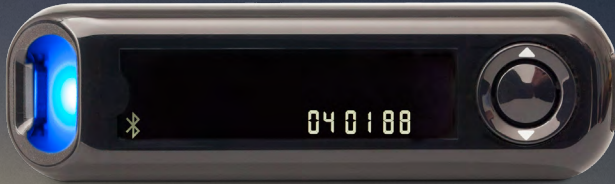

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم





4.

#### اقتان جهاز القياس

حدد الرقم التسلسلي لجهاز القياس.

يمكنك إيجاد الرقم التسلسلي على الملصق  
الموجود على ظهر جهاز القياس.

اختر "متابعة".

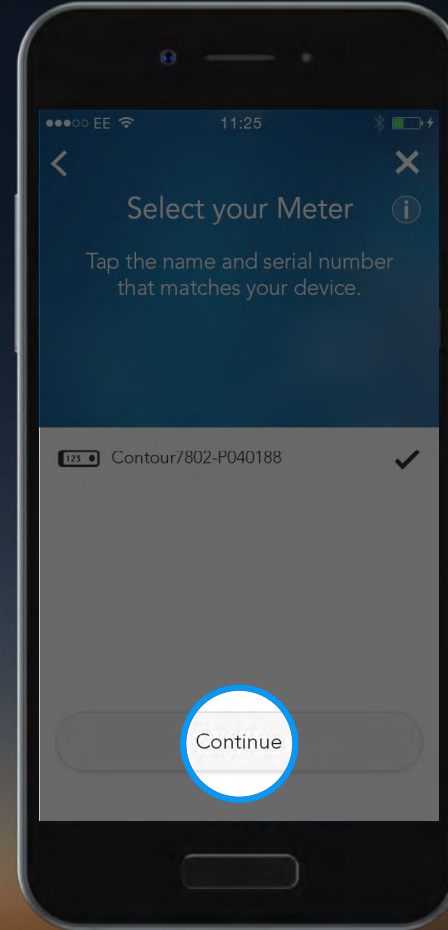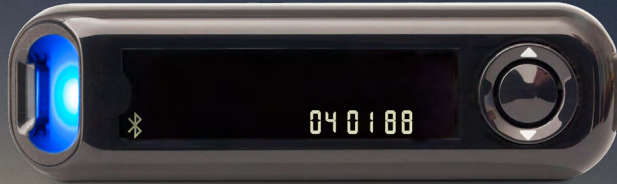



Contour™  
next ONE®

نظام مراقبة جلوكوز الدم

5.

اقتران جهاز القياس

**CONTOUR DIABETES** سيتصل الآن تطبيق  
بجهاز القياس.

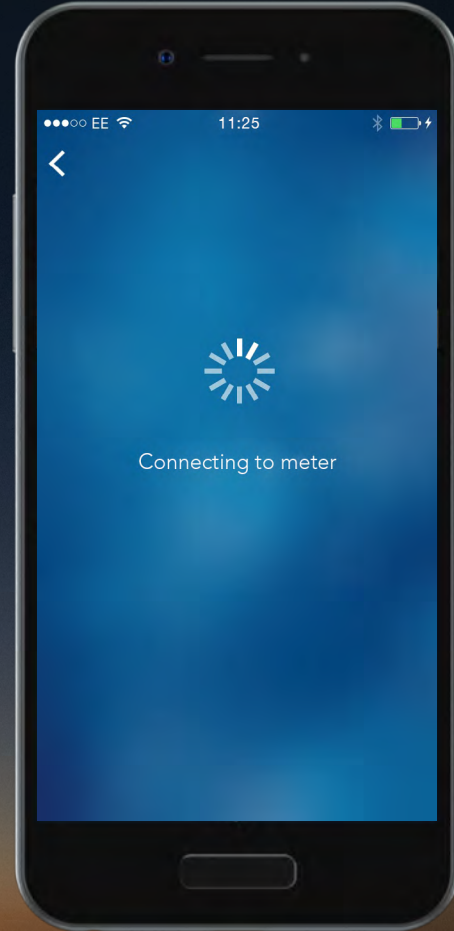
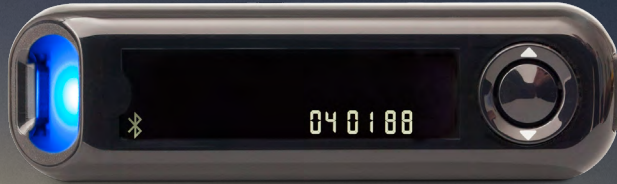


Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>»</sup>  
نظام مراقبة جلوكوز الدم

6.

## اقتران جهاز القياس

اختر "اقتران" لتأكيد طلب الاقتران

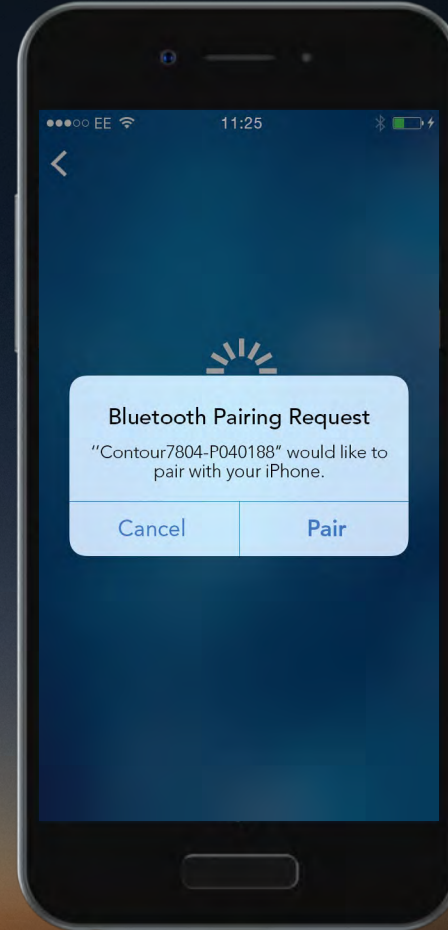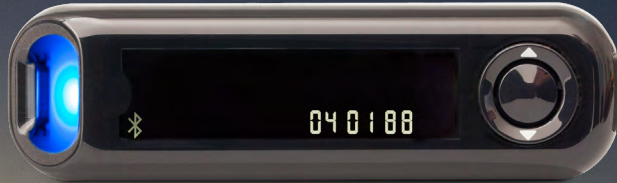


Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم

6.

### اقتران جهاز القياس

اختر "اقتران" لتأكيد طلب الاقتران


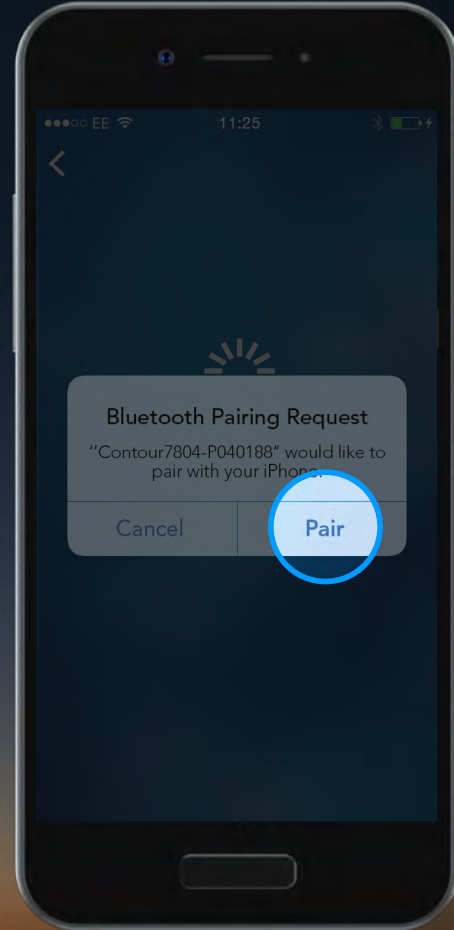


Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>  
نظام مراقبة جلوكوز الدم

6.

### اقتران جهاز القياس

اختر "اقتران" لتأكيد طلب الاقتران

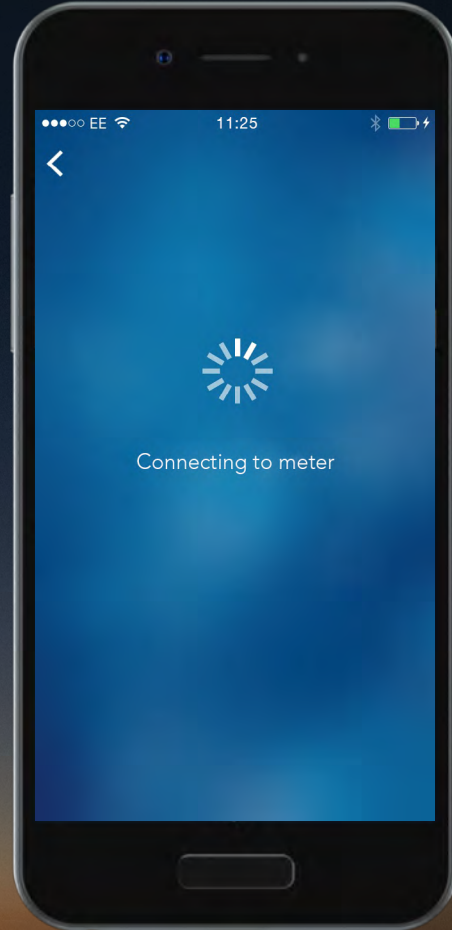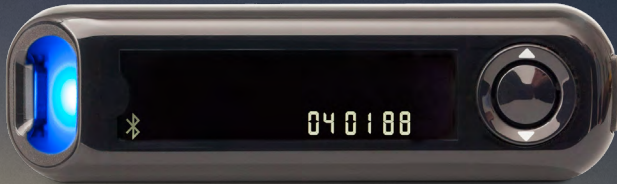

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم


7.

## اقتران جهاز القياس

بمجرد اقتران جهاز القياس اختر "متابعة".

أنت الآن جاهز لإعداد تطبيق

**CONTOUR DIABETES**

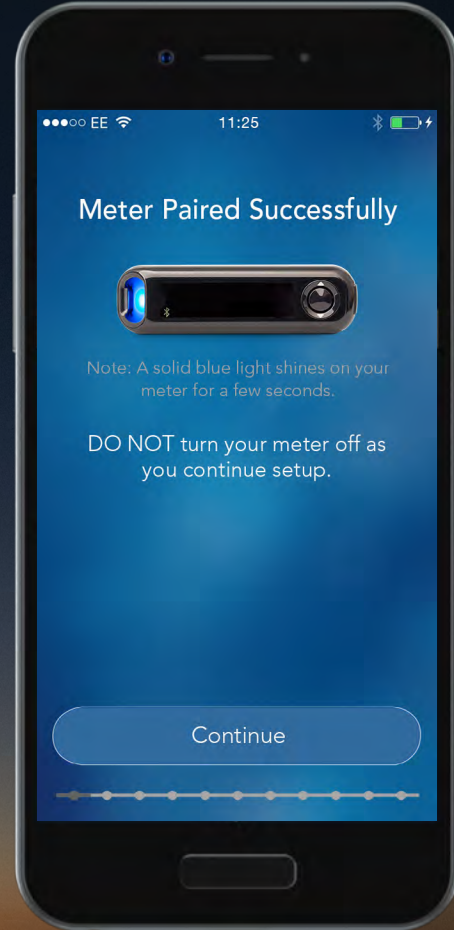

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>»</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم


7.

## اقتران جهاز القياس

بمجرد اقتران جهاز القياس اختر "متابعة".

أنت الآن جاهز لإعداد تطبيق

**CONTOUR DIABETES**

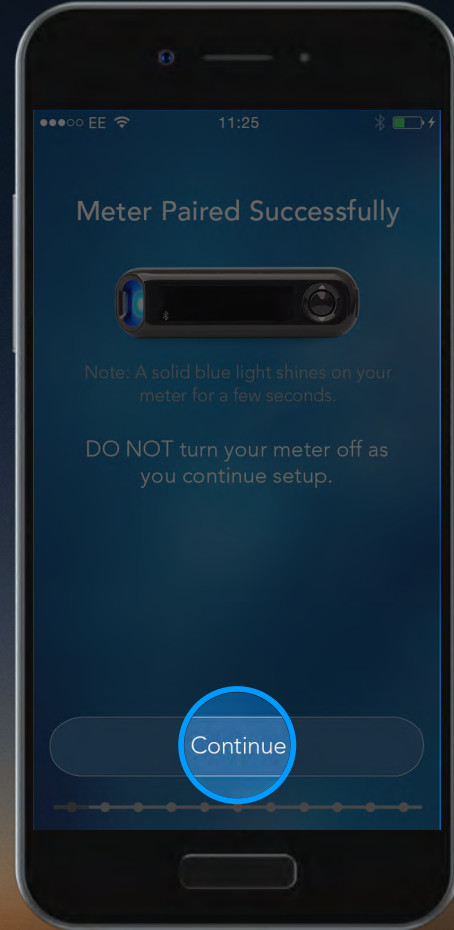


Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>»</sup>

نظام مراقبة جلوكوز الدم

تحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك واطلع على دليل  
المستخدم إذا كانت لديك استفسارات حول جهاز القياس الذي  
وتطبيق **CONTOUR® NEXT ONE**  
**CONTOUR™ DIABETES**

للمزيد من المعلومات، ولمعرفة ما إذا كان جهاز القياس  
CONTOUR® NEXT ONE متاحاً في بلدك، تفضل بزيارة  
[diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)

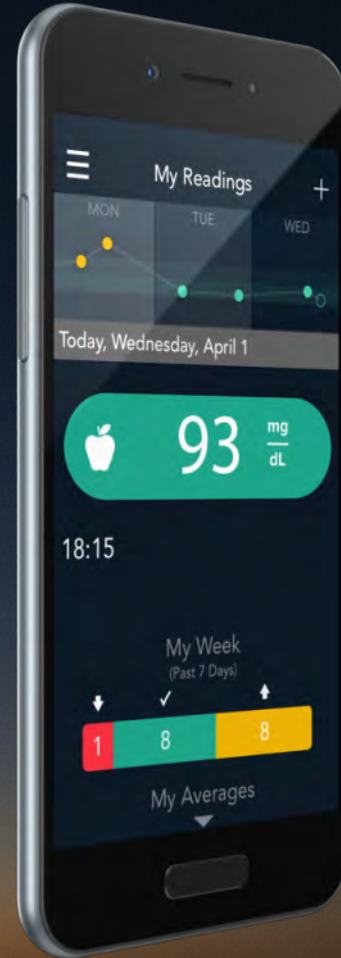

احصل على التطبيق



إنَّ Apple وشعار Apple وعلامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.  
إنَّ App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. . إنَّ Google Play علامة تجارية لشركة Google Inc  
إنَّ Ascensia، وشعار Ascensia Diabetes Care Holdings AG وCONTOUR وعلامات تجارية لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Contour  
next ONE™  
نظام مراقبة جلوكوز الدم





# Contour™

diabetes solutions