




Contour™ next ONE»


نظام مراقبة جلوكوز الدم

اختبار نسبة السكر في دمك لأول مرة
باستخدام جهاز القياس الذكي
CONTOUR™NEXT ONE

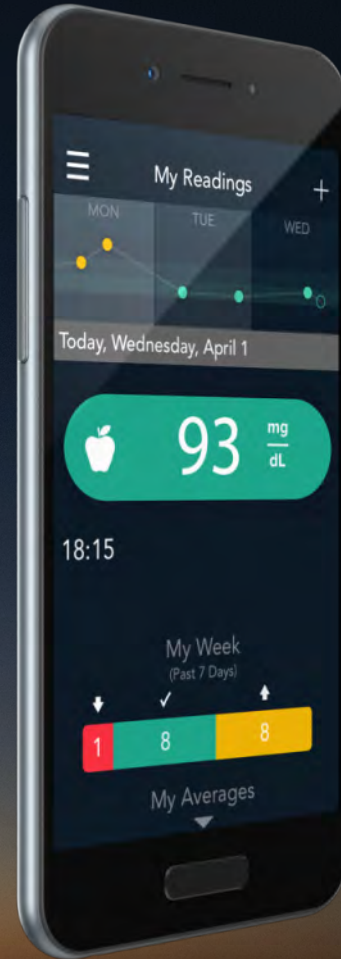

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

قد تبين أن جهاز القياس
يوفر **CONTOUR NEXT ONE**
نتائج فائقة الدقة لقياس نسبة السكر في الدم.

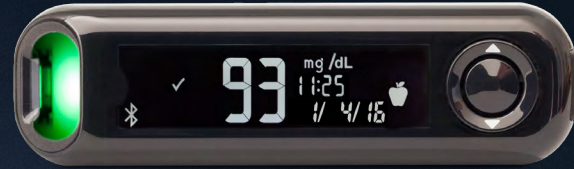


ContourTM
next ONE[»]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

الإعداد الأولي لجهاز القياس
CONTOUR NEXT ONE



ContourTM
next ONE[»]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

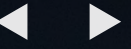

الإعداد الأولي


يتطلب هذا الجهاز إعداداً أولياً بسيطاً قبل القيام بالاختبار.

تعرف على الفوائد في ثلاث خطوات بسيطة.

اضغط باستمرار على الزر "موافق" لمدة ثانيتين حتى يعمل جهاز القياس.



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

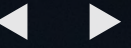

الإعداد الأولي


يتطلب هذا الجهاز إعداداً أولياً بسيطاً قبل القيام بالاختبار.

تعرف على الفوائد في ثلاث خطوات بسيطة.

اضغط باستمرار على الزر "موافق" لمدة ثانيتين حتى يعمل جهاز القياس.



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

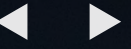


الإعداد الأولي

يتطلب هذا الجهاز إعداداً أولياً بسيطاً قبل القيام بالاختبار.

تعرف على الفوائد في ثلاث خطوات بسيطة.

اضغط باستمرار على الزر "موافق" لمدة ثانيتين حتى يعمل جهاز القياس.

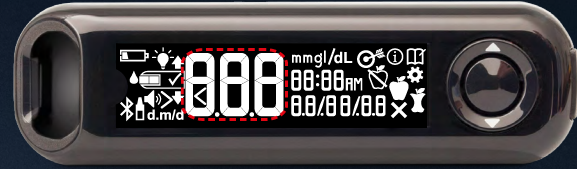

ContourTM
next ONE[»]

نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

الإعداد الأولي

سجل النطاقات المستهدفة* واقبلها.
اضغط على زر "موافق".


* يمكنك تغيير النطاق المستهدف المحدد مسبقًا من تطبيق

CONTOUR DIABETES

بعد الإعداد الأولي لجهاز القياس.

تحذير - تحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك قبل
إعداد أو تغيير أي نطاقات مستهدفة في تطبيق

CONTOUR DIABETES

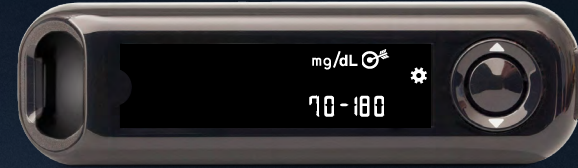

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

1.

الإعداد الأولي

سجل النطاقات المستهدفة* واقبلها.
اضغط على زر "موافق".


* يمكنك تغيير النطاق المستهدف المحدد مسبقًا من تطبيق

CONTOUR DIABETES

بعد الإعداد الأولي لجهاز القياس.

تحذير - تحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك قبل
إعداد أو تغيير أي نطاقات مستهدفة في تطبيق

CONTOUR DIABETES

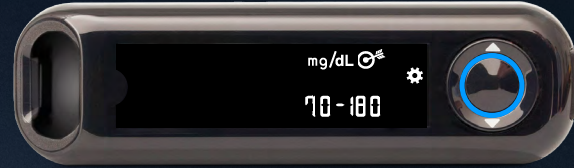

Contour™
next ONE®

نظام مراقبة جلوكوز الدم

2.

الإعداد الأولي


أكد الوقت على جهاز القياس او اضبطه

لتغيير الساعة، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية


لضبط الساعة والانتقال إلى الدقائق، اضغط على زر "موافق".

لتغيير الدقائق، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.

اضغط على زر "موافق".

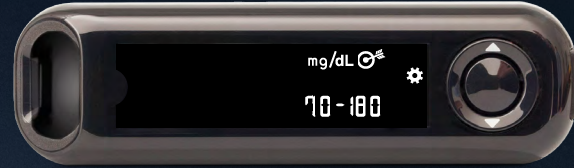

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

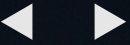

2.

الإعداد الأولي

أكد الوقت على جهاز القياس او اضبطه

لتغيير الساعة، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية

لضبط الساعة والانتقال إلى الدقائق، اضغط على زر "موافق".

لتغيير الدقائق، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.

اضغط على زر "موافق".



ContourTM
next ONE[®]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

2.

الإعداد الأولي

أكد الوقت على جهاز القياس او اضبطه

لتغيير الساعة، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية

لضبط الساعة والانتقال إلى الدقائق، اضغط على زر "موافق".

لتغيير الدقائق، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.

اضغط على زر "موافق".



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

2.

الإعداد الأولي

أكد الوقت على جهاز القياس او اضبطه

لتغيير الساعة، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية


لضبط الساعة والانتقال إلى الدقائق، اضغط على زر "موافق".

لتغيير الدقائق، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.

اضغط على زر "موافق".



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

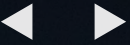

3.

الإعداد الأولي

أكد التاريخ على جهاز القياس او اضبطه.

لتغيير العام، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير الشهر، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير اليوم، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.


الإعداد الأولي

أكد التاريخ على جهاز القياس او اضبطه.

لتغيير العام، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير الشهر، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير اليوم، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

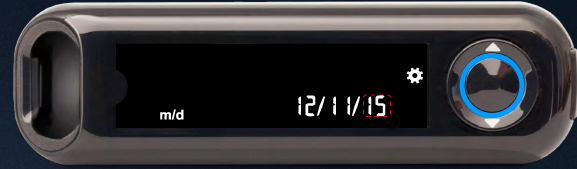

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.


الإعداد الأولي

أكد التاريخ على جهاز القياس او اضبطه.

لتغيير العام، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير الشهر، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير اليوم، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

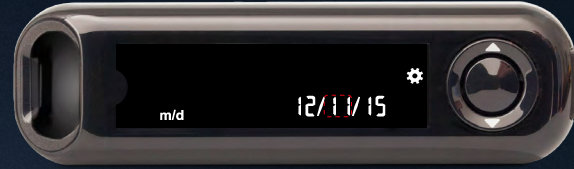

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.


الإعداد الأولي

أكد التاريخ على جهاز القياس او اضبطه.


لتغيير العام، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير الشهر، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير اليوم، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

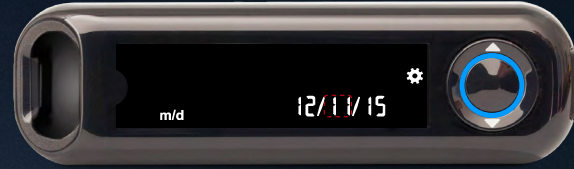

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

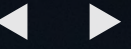

3.


الإعداد الأولي

أكد التاريخ على جهاز القياس او اضبطه.

لتغيير العام، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير الشهر، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير اليوم، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

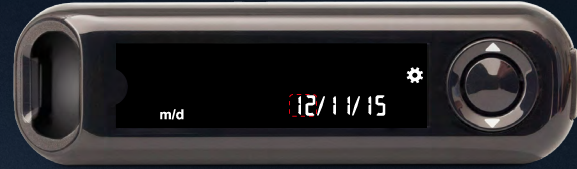

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.


الإعداد الأولي

أكد التاريخ على جهاز القياس او اضبطه.


لتغيير العام، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير الشهر، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

لتغيير اليوم، اضغط على ▼ أو ▲ بالحلقة الخارجية.
اضغط على زر "موافق".

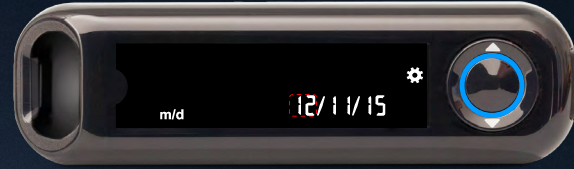

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

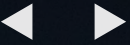


4.


الإعداد الأولي

يعرض جهاز القياس باختصار الإعدادات المحفوظة، ثم يصدر صوت صفير، وينطفئ


اكتمل الإعداد.
أنت الآن جاهزٌ لاختبار نسبة السكر في دمك.

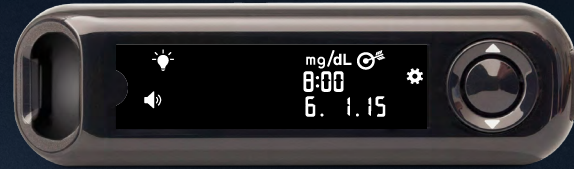


ContourTM
next ONE[®]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

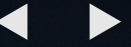

اختبار نسبة السكر في دمك
بجهاز القياس الذكي
CONTOUR®NEXT ONE

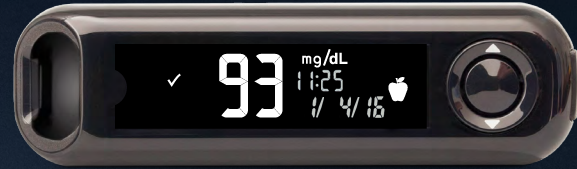

Contour™
next ONE»
نظام مراقبة جلوكوز الدم

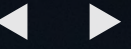

1.


أدخِل شريط الاختبار

أمسك شريط الاختبار بحيث يكون طرف المربع الرمادي
بمواجهة جهاز القياس

أدخِل طرف المربع الرمادي بإحكام في منفذ شريط الاختبار
حتى يطلق جهاز القياس صوت صفير



ContourTM
next ONE[®]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

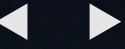

1.

أدخِل شريط الاختبار

أمسك شريط الاختبار بحيث يكون طرف المربع الرمادي
بمواجهة جهاز القياس

أدخِل طرف المربع الرمادي بإحكام في منفذ شريط الاختبار
حتى يطلق جهاز القياس صوت صفير



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

2.

ضع عينة الدم

سيومض رمز شريط الاختبار عندما يكون جهاز القياس جاهزاً
لاختبار قطرة الدم


لامس فوراً طرف شريط الاختبار بقطرة الدم

يتم سحب الدم في شريط الاختبار عبر الطرف

ثبّت طرف شريط الاختبار في قطرة الدم حتى يصدر جهاز
القياس صوت صفير



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

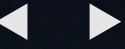

3.


النتائج

بعد ٥ ثوانٍ من العد التنازلي سيعرض جهاز القياس نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك

إذا كانت خاصية علامة الوجبة قيد التشغيل، ستومض علامة الصيام، أو قبل الوجبة، أو بعد الوجبة، أو بدون علامة على شاشة نتيجة سكر الدم



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

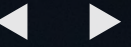

3.


النتائج

بعد ٥ ثوانٍ من العد التنازلي سيعرض جهاز القياس نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك

إذا كانت خاصة علامة الوجبة قيد التشغيل، ستومض علامة الصيام، أو قبل الوجبة، أو بعد الوجبة، أو بدون علامة على شاشة نتيجة سكر الدم



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

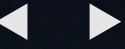

3.


النتائج

بعد ٥ ثوانٍ من العد التنازلي سيعرض جهاز القياس نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك

إذا كانت خاصية علامة الوجبة قيد التشغيل، ستومض علامة الصيام، أو قبل الوجبة، أو بعد الوجبة، أو بدون علامة على شاشة نتيجة سكر الدم



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

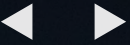

3.


النتائج

بعد ٥ ثوانٍ من العد التنازلي سيعرض جهاز القياس نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك

إذا كانت خاصية علامة الوجبة قيد التشغيل، ستومض علامة الصيام، أو قبل الوجبة، أو بعد الوجبة، أو بدون علامة على شاشة نتيجة سكر الدم



Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

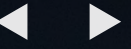


3.

النتائج

بعد ٥ ثوانٍ من العد التنازلي سيعرض جهاز القياس نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك

إذا كانت خاصية علامة الوجبة قيد التشغيل، ستومض علامة الصيام، أو قبل الوجبة، أو بعد الوجبة، أو بدون علامة على شاشة نتيجة سكر الدم

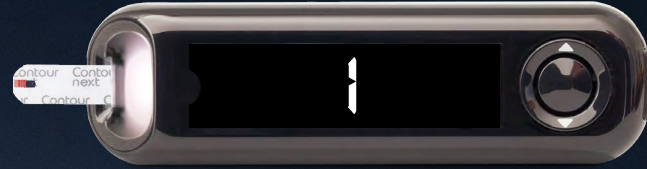


Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

3.

النتائج

بعد ٥ ثوانٍ من العد التنازلي سيعرض جهاز القياس نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك

إذا كانت خاصية علامة الوجبة قيد التشغيل، ستومض علامة الصيام، أو قبل الوجبة، أو بعد الوجبة، أو بدون علامة على شاشة نتيجة سكر الدم

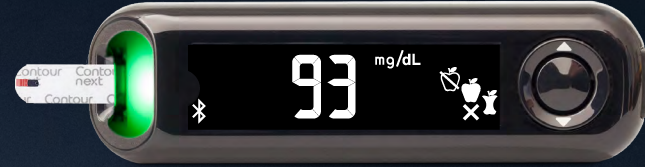

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم


4.

النتائج

يعرض جهاز القياس علامة الوجبة هذه بناءً على الوقت من اليوم وفترة الوجبة: الصيام/الإفطار، أو الغداء، أو العشاء، أو خلال الليل

استخدم الزر ▼ أو ▲ لتحديد العلامة الصحيحة ثم اضغط على موافق

يمكنك تحديد علامة الوجبة لقراءة السكر في الدم على جهاز القياس أو في تطبيق
CONTOUR DIABETES

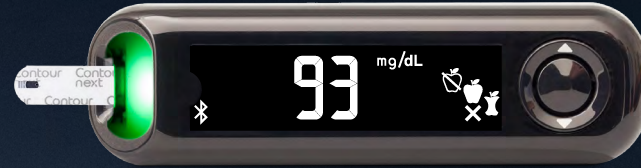

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم


4.

النتائج

يعرض جهاز القياس علامة الوجبة هذه بناءً على الوقت من اليوم وفترة الوجبة: الصيام/الإفطار، أو الغداء، أو العشاء، أو خلال الليل

استخدم الزر ▼ أو ▲ لتحديد العلامة الصحيحة ثم اضغط على موافق

يمكنك تحديد علامة الوجبة لقراءة السكر في الدم على جهاز القياس أو في تطبيق
CONTOUR DIABETES

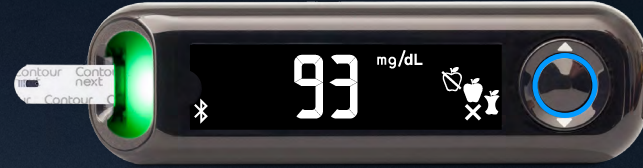

Contour™
next ONE®
نظام مراقبة جلوكوز الدم

5.

النتائج

عند إتمام اختبار السكر في دمك، يعرض جهاز القياس نتيجتك بالوحدات، والوقت، والتاريخ، وعلامة الوجبة (إذا تم اختيارها) ومؤشر الهدف

تكون خاصية smarLIGHT[™] باللون الأخضر للقياسات التي تقع داخل النطاق المستهدف، وباللون الأحمر للقياسات أقل من النطاق المستهدف، وباللون الأصفر للقياسات الأعلى من النطاق المستهدف




Contour[™]
next ONE[®]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

6.

النتائج

CONTOUR DIABETES يعرض تطبيق
نتيجتك الأحدث على جهازك الجوال بالإضافة إلى معلومات
لمساعدتك على السيطرة على مرض السكري

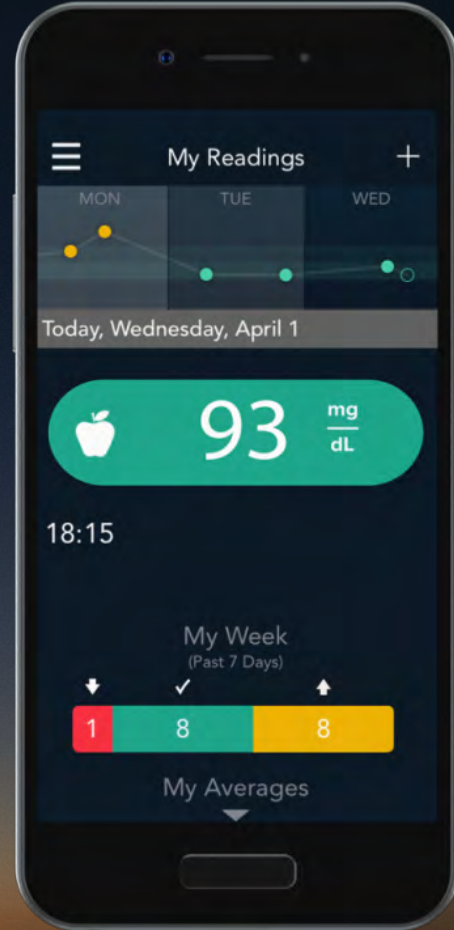

ContourTM
next ONE[®]
نظام مراقبة جلوكوز الدم

تحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك واطلع على دليل
المستخدم إذا كانت لديك استفسارات حول جهاز القياس الذي
وتطبيق **CONTOUR® NEXT ONE**
CONTOUR™ DIABETES


للمزيد من المعلومات، ولمعرفة ما إذا كان جهاز القياس
CONTOUR® NEXT ONE متاحاً في بلدك، تفضل بزيارة
diabetes.ascensia.com



احصل على التطبيق



إنَّ Apple وشعار Apple وعلامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
إنَّ App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. . إنَّ Google Play علامة تجارية لشركة Google Inc
إنَّ Ascensia، وشعار Ascensia Diabetes Care وCONTOUR وعلامات تجارية لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

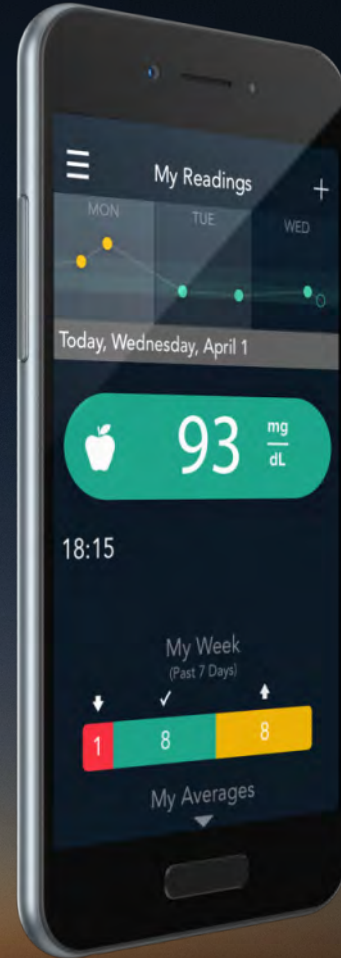

Contour
next ONE™
نظام مراقبة جلوكوز الدم



Contour™

diabetes solutions