



Contour™ next ONE))

نظام مراقبة جلوكوز الدم

عرض اتجاهات نتائج الجلوكوز
في الدم مع تطبيق كونتور للسكري
CONTOUR™DIABETES app




استشيروا دائما أخصائي الرعاية الصحية لديكم قبل إجراء أي تغييرات في
العلاج، النظام الغذائي أو ممارسة التمارين



Contour™
next ONE®
نظام اختبار الجلوكوز لدم

diabetes.ascensia.com

تسمح خاصية اتجاهاتي
بكشف **My Patterns**
اتجاهات محددة في نتائج جلوكوز
الدم وتعلمكم بالأسباب المحتملة
لهذه الاتجاهات.

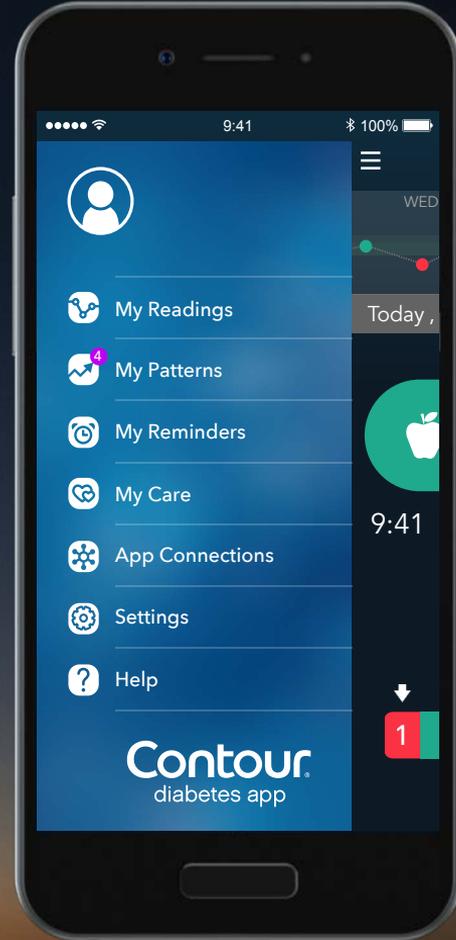

Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com

اتجاهاتي PATTERNS


عندما يكشف تطبيق كونتور للسكري

CONTOUR™DIABETES app

عن اتجاه محدد في نتائج جلوكوز الدم ،

تتلقون رسالة تعلمكم باكتشاف اتجاه جديد.

.1

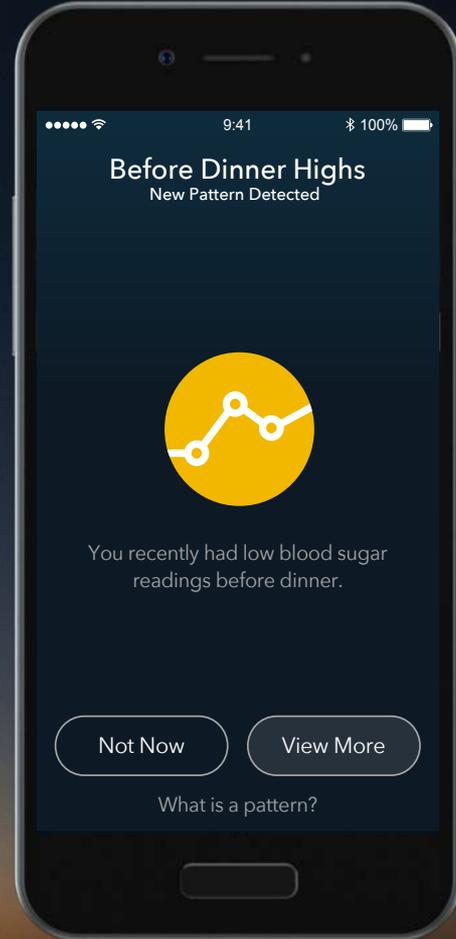

Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم


diabetes.ascensia.com

PATTERNS اتجاهاتي

عندما يكشف تطبيق كونتور للسكري
CONTOUR™DIABETES app
عن اتجاه محدد في نتائج جلوكوز الدم ،
تتلقون رسالة تعلمكم بإكتشاف اتجاه جديد.

إضغطوا على **View more**
لمعرفة المزيد عن الاتجاه

.2

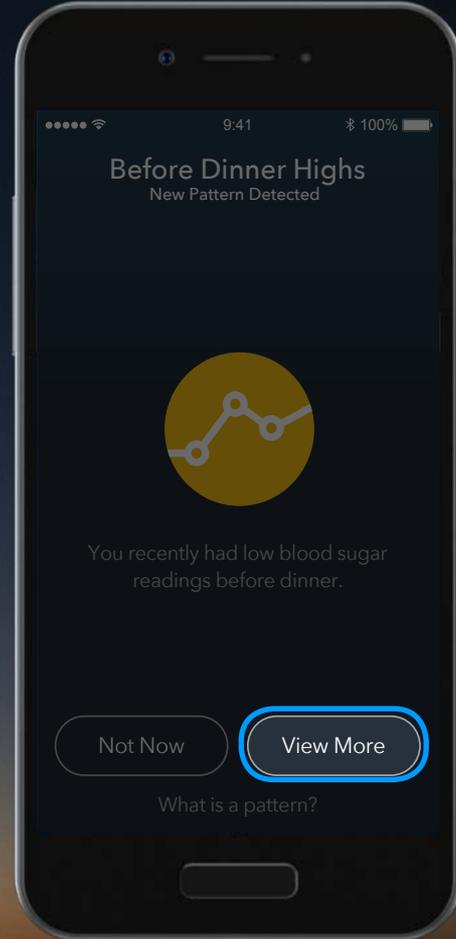


Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

اتجاهات PATTERNS

.2

يشير الإتجاه Recent Highs إلى أن ثلاث نتائج جلوكوز الدم الأخيرة كانت أعلى من النطاق المستهدف.

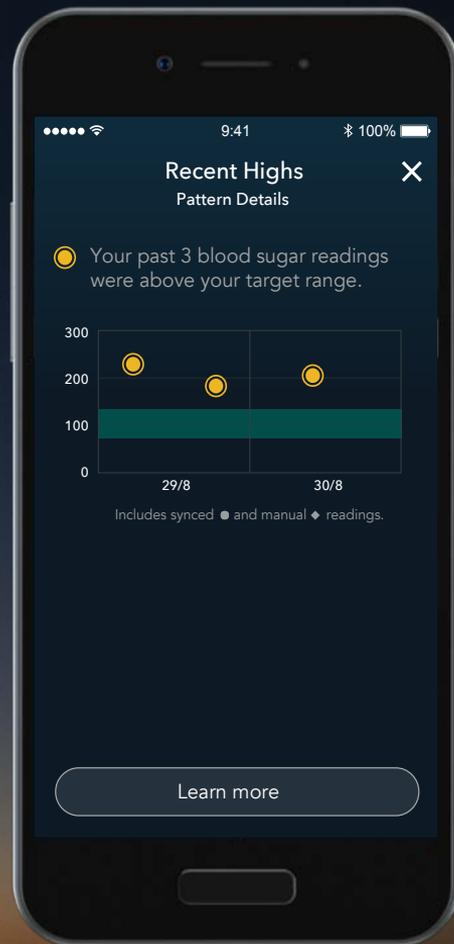

Contour™
next ONE®

نظام القياس الإلكتروني لدم

PATTERNS اتجاهاتي

.2

Recent Highs شريد الإتجاه

إلى أن ثلاث نتائج جلوكوز الدم
الأخرية كانت أعلى من النطاق المستهدف.

إضغظوا على **Learn more**
لمعرفة الأسباب المحتملة لذلك




Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

تجاهات PATTERNS

3.

إن كنتم تعرفون سبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، ميكنكم تحديده هنا.

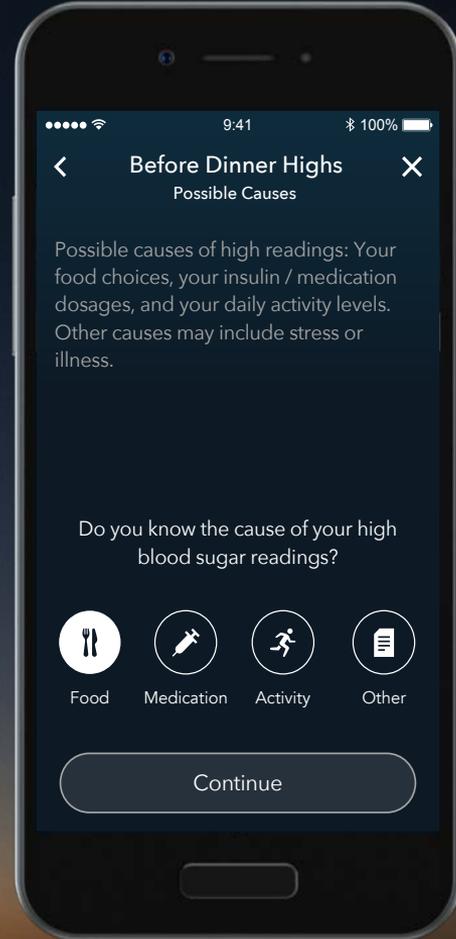


Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

تجاهات PATTERNS

.3

إن كنتم تعرفون سبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، ميكنكم تحديده هنا.

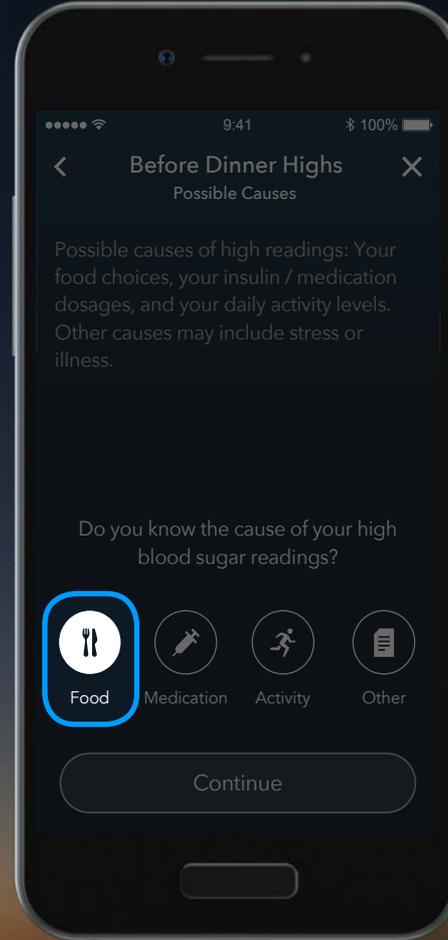


Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

تجاهات PATTERNS

.4

يوفر التطبيق كونتور للسكري

CONTOUR™DIABETES app
بعض المعلومات عن الأسباب المحتملة لهذا الاتجاه.

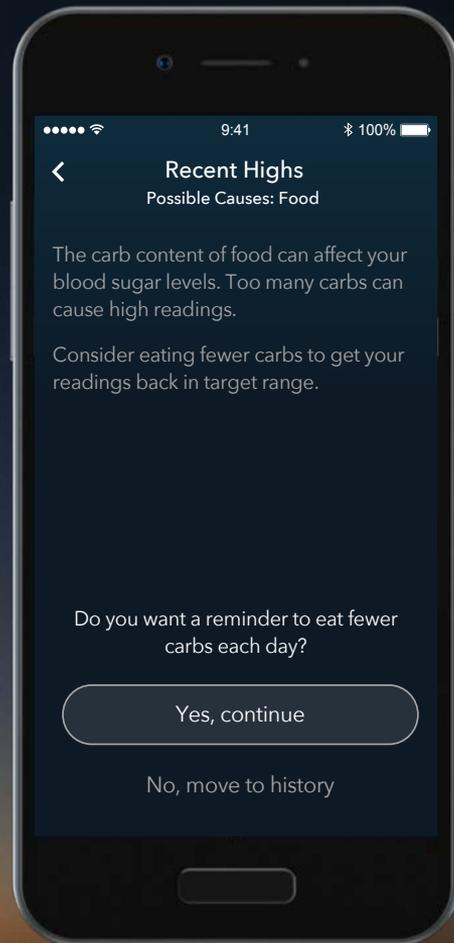

Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

تجاهات PATTERNS

4.

يوفر التطبيق كونتور للسكري

CONTOUR™DIABETES app

بعض المعلومات عن الأسباب المحتملة لهذا الاتجاه.

اضغطوا على **Yes, continue**

لضبط مذكري ينبهكم بإستهلاك

كمية أقل من الكربوهيدرات كل يوم.




Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com

تجاهيات PATTERNS

.5

استخدموا العجلة لتحديد توقيت
لتذكير بإستهلاك كمية أقل من
الكربوهيدرات كل يوم.

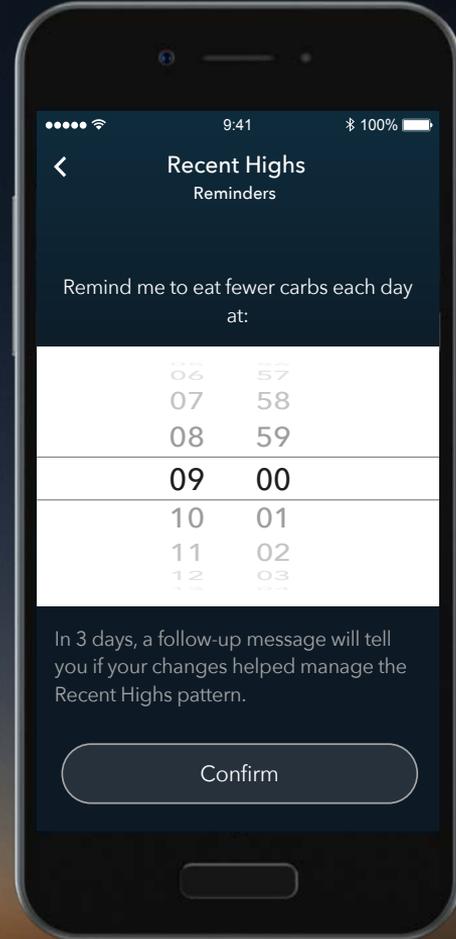


Contour™
next ONE®

نظام القياس لقياس السكر في الدم

تجاهلي ت PATTERNS .5

استخدموا العجلة لتحديد توقيت
اتذكيري باستهلاك كمية أقل من
الكربوهيدرات كل يوم.

إضغطوا على **Confirm**
لضبط التوقيت.

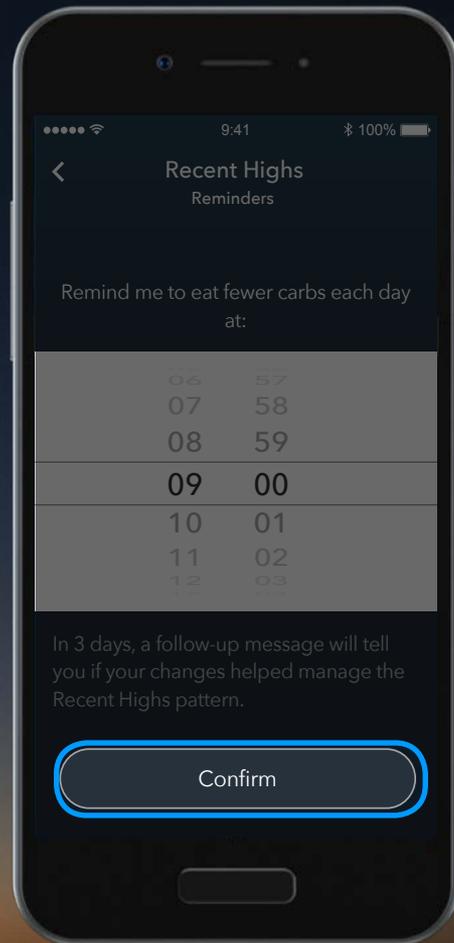


Contour™
next ONE®
نظام القياس لمرض السكري

diabetes.ascensia.com

تجاهلي ت PATTERNS .6

سيتم عرض اذكري في الوقت المحدد

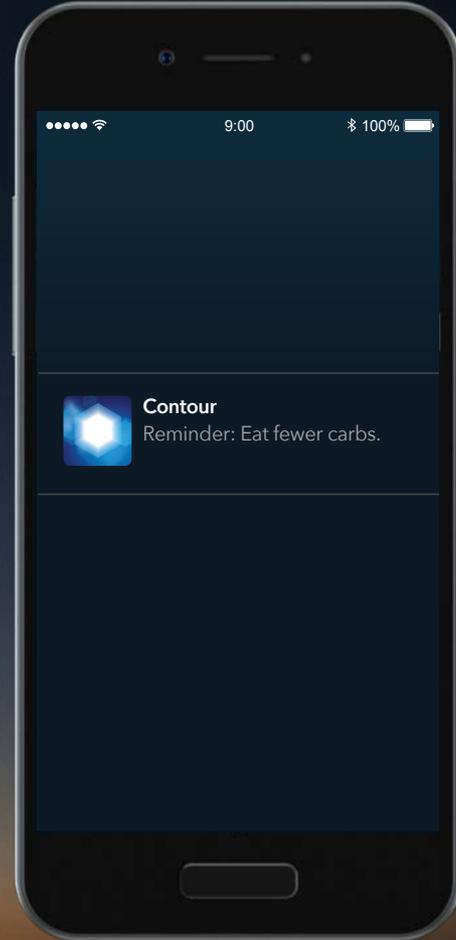


Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس لدم

PATTERNS تجاهلي ت

.6

سيتم عرض اذكري في الوقت المحدد

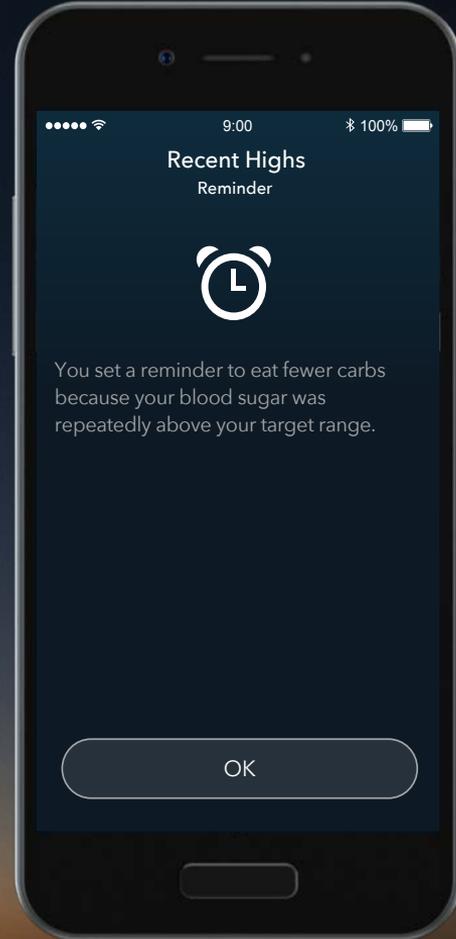


Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس لدم

تجاهلي ت PATTERNS

.7

بعد 3 أيام ، ستخبركم رسالة المتابعة إن كانت لتغييرات التي أجريتموها قد

اهمت في تحسين الاتجاه **Recent High**.

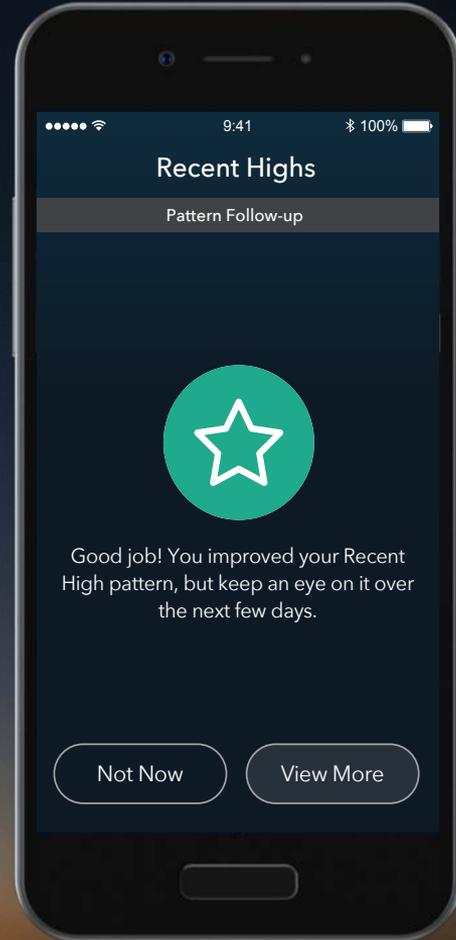

Contour™
next ONE®

نظام القياس لقياس السكر في الدم


تجاهلي ت PATTERNS

.7

بعد 3 أيام ، ستخبركم رسالة المتابعة إن كانت لتغييرات التي أجريتموها قد

اهمت في تحسين الاتجاه **Recent High**.

إضغطوا على **View more** لمعرفة المزيد

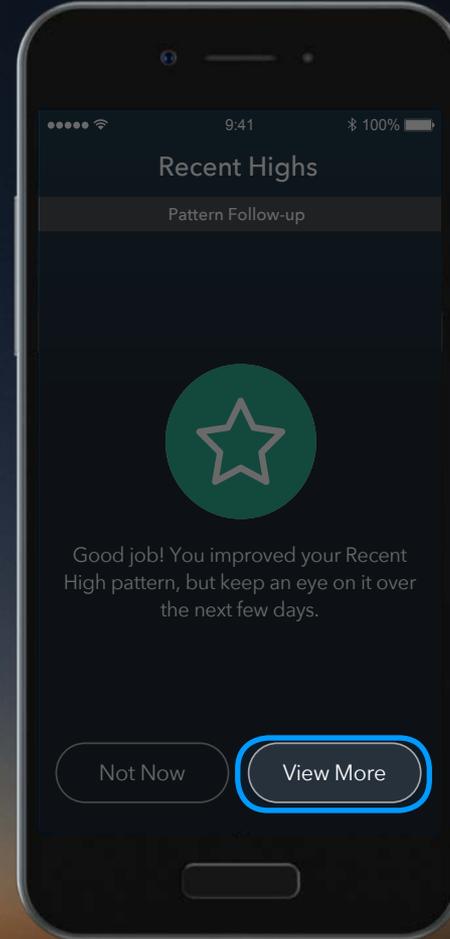

Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com

تجاهليّة PATTERNS


.7

تم نقل هذا الاتجاه إلى سجل الاتجاهات

Pattern history

يمكن الاطلاع عليه في أي وقت بالضغط على

My Patterns (اتجاهليّة) في القائمة الرئيسية.

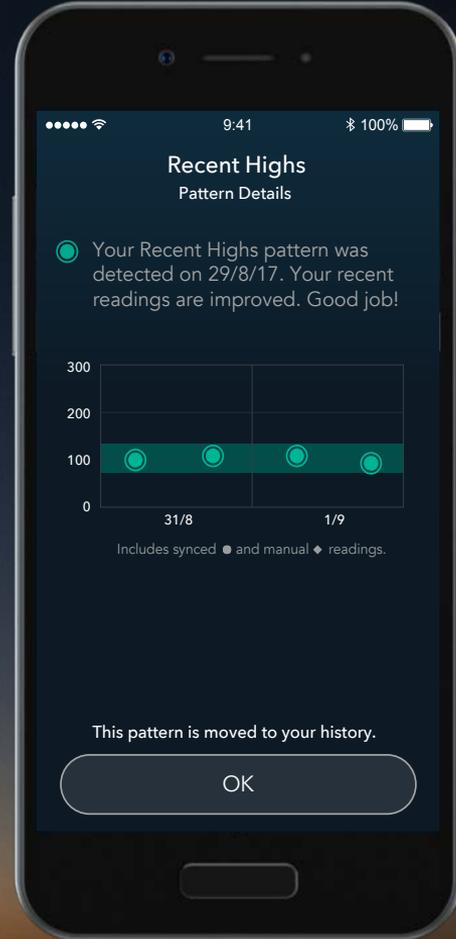

Contour™
next ONE®

نظام اتّجّاب لقيّوز لدم


تجاهليّات PATTERNS

8.

ميكنكم الاطلاع في أي وقت على الاتجاهات الخاصة بكم في سجل الاتجاهات

Pattern history

لإضافة ملاحظات حول الأسباب المحتملة لهذه الاتجاهات لمساعدتكم خلال مواعيدكم المقبلة مع أ صليّد الرعاية الصحية .

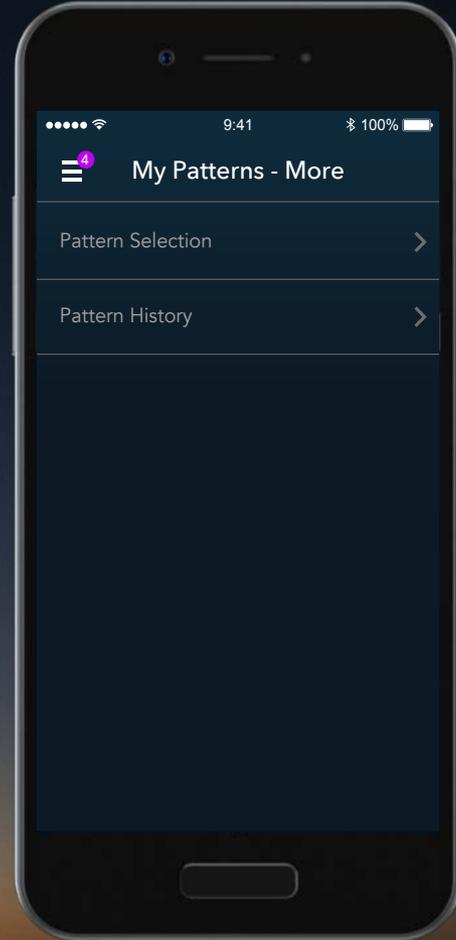

Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com

تجاهلي ت PATTERNS

.8

ميكنكم الاطلاع في أي وقت على الاتجاهات
الخاصة بكم في سجل الاتجاهات

Pattern history

لإضافة ملاحظات حول الأسباب المحتملة لهذه
الاتجاهات لمساعدتكم خلال مواعيدكم
المقبلة مع أ صلي د الرعاية الصحية .



Contour™
next ONE®
نظام القياس لقياس السكر في الدم

إتصلوا بأخصائي الرعاية الصحية لديكم وراجعوا
دليل المستخدم إذا كانت لديكم أسئلة حول
جهاز قياس الجلوكوز في الدم الذك كونتور بلص وان
CONTOUR®NEXT ONE أوتطبيق كونتور للسكري
.CONTOUR™DIABETES app

للمزيد من المعلومات ولمعرفة ما إذا كانت
هذه المنتجات متوفرة في بلدكم، قوموا
بزيارة الموقع diabetes.ascensia.com



بيانات مريض افتراضية لأغراض توضيحية فقط
ستشيرنا دلمناً أصلياً الرعاية الصحية لديكم قبل إجراء أي مخبريات في العلاج، لنظام الغذائي و ممارسة التمارين



إن Apple وشعار Apple علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
إن App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. . إن Google Play علامة تجارية لشركة Google Inc
إن Ascensia، وشعار Ascensia Diabetes Care Holdings AG و CONTOUR علامات تجارية لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG



Contour™
next ONE®
نظام القياس الإلكتروني للسكر في الدم



Contour[®]

diabetes solutions