



# Contour™ next ONE))

نظام مراقبة جلوكوز الدم

استخدام خاصة اتجاهاتي  
My Patterns  
لتطبيق كونتور للسكري  
CONTOUR™ DIABETES app




استشيروا دائما أخصائي الرعاية الصحية لديكم قبل إجراء أي تغييرات في العلاج، النظام الغذائي أو ممارسة التمارين



Contour™  
next ONE®  
نظام اختبار لقياس لدم


تسمح خاصية اتجاهاتي **My Patterns** بكشف اتجاهات محددة في نتائج جلوكوز الدم وتعلمكم بالأسباب المحتملة لهذه الاتجاهات.

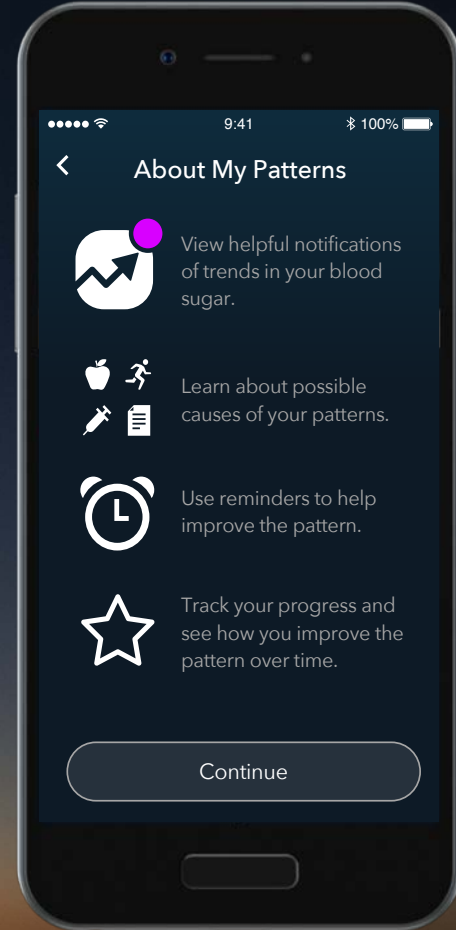

Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com

تسمح خاصية اتجاهاتي **My Patterns** بكشف اتجاهات محددة في نتائج جلوكوز الدم وتعلمكم بالأسباب المحتملة لهذه الاتجاهات.

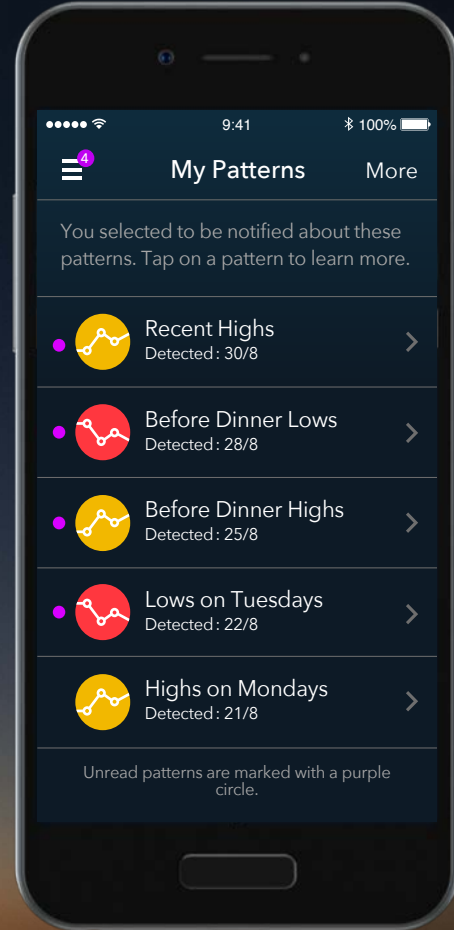


Contour™  
next ONE®  
نظام اتجاهات جلوكوز لدم

diabetes.ascensia.com

## اتجاهاتي MY PATTERNS

إضغطوا على  
My Patterns في القائمة الرئيسية

.1

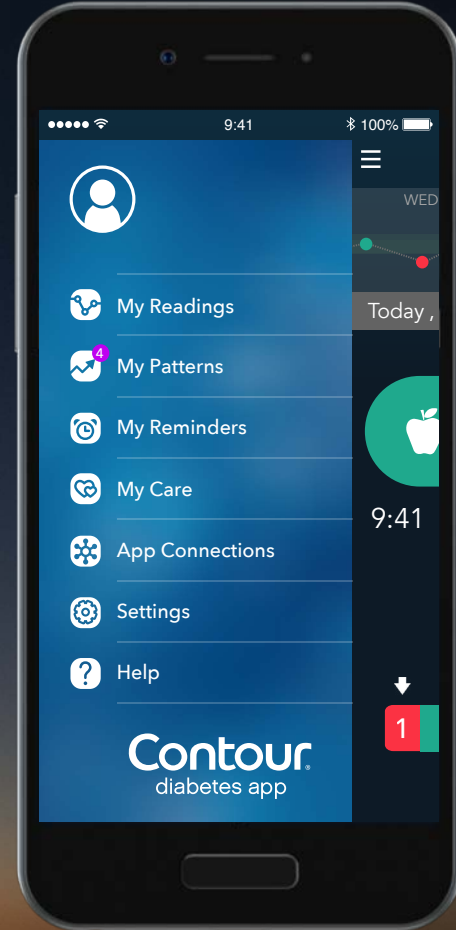


Contour™  
next ONE®  
نظام اتب لقيوس لدم

diabetes.ascensia.com

## اتجاهاتي MY PATTERNS

تعرض شاشة My Patterns (اتجاهاتي) الاتجاهات التي إخترتم أن يتم إعلامكم بها. يتم تمييز الإتجاهات الغير مقروءة بدائرة بنفسجية.

.2

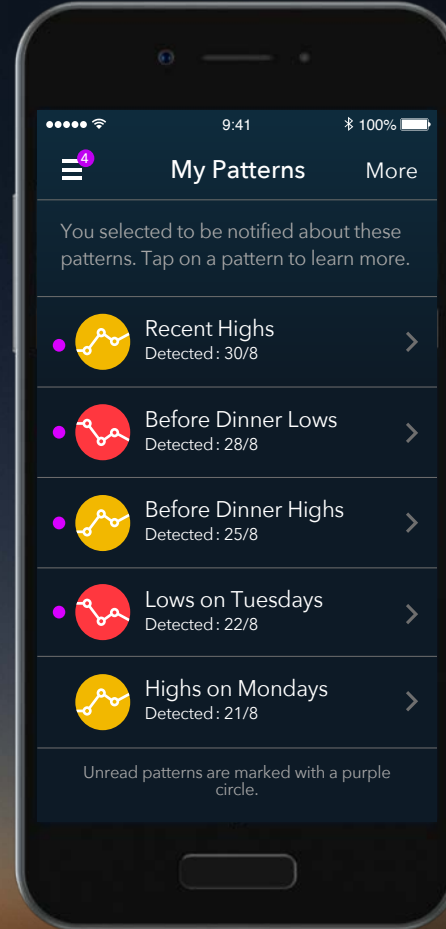


Contour™  
next ONE®  
نظام إمتداد لقيوس لدم

## اتجاهاتي MY PATTERNS

إضغطوا على **More** لتغيير إعدادات إختيار اتجاهاتكم  
pattern selection أو الاطلاع  
على سجل الاتجاهات pattern history.

.2

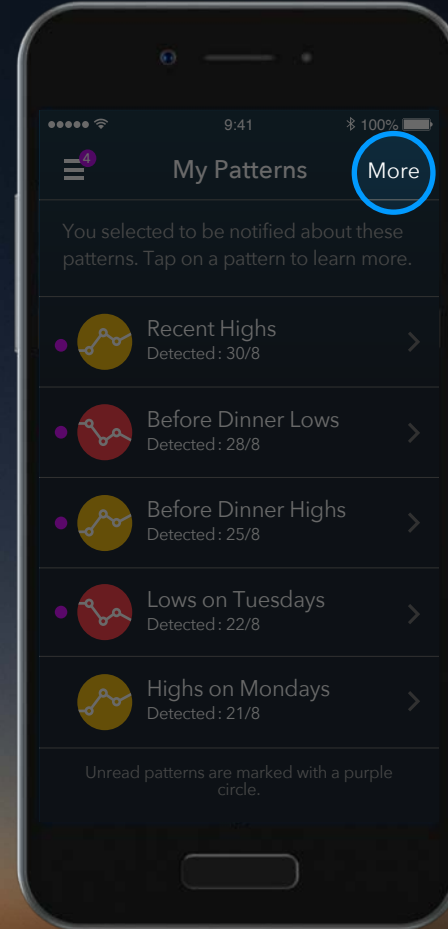

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>  
نظام انجذب جليفيوز لدم


diabetes.ascensia.com



## MY PATTERNS اتجاهاتي

إضغطوا على **Pattern selection** لاختيار الاتجاهات التي تريدون أن يتم إعلامكم بها.

.3

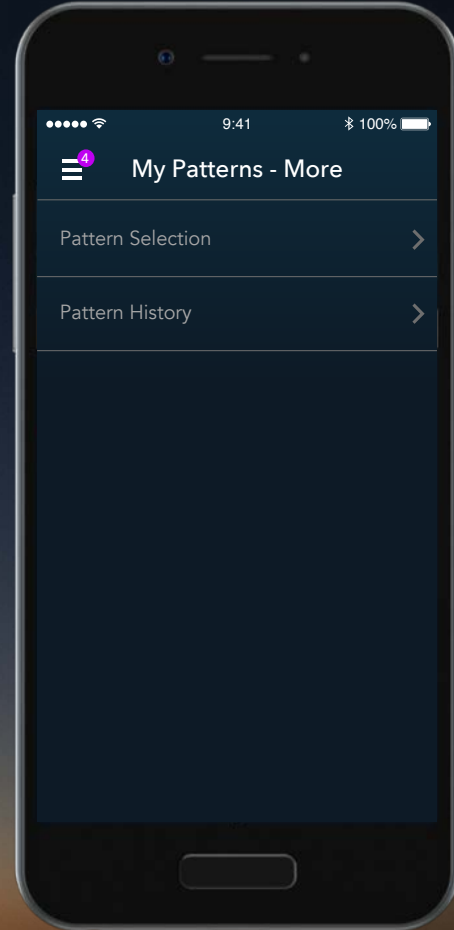


Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس السكر في الدم



## اتجاهاتي MY PATTERNS

إضغطوا على Pattern selection لاختيار الاتجاهات التي تريدون أن يتم إعلامكم بها.

3.

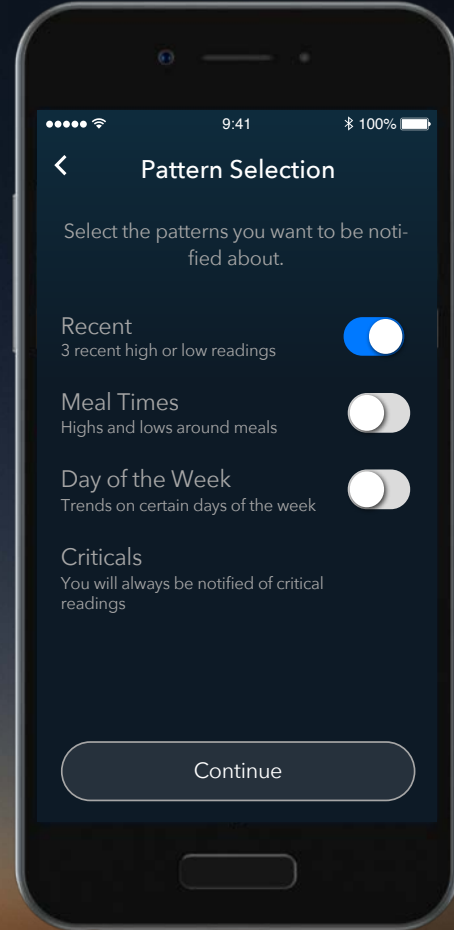


Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس السكر في الدم

## MY PATTERNS اتجاهاتي

إضغطوا على Pattern selection لاختيار الاتجاهات التي تريدون أن يتم إعلامكم بها.

.3

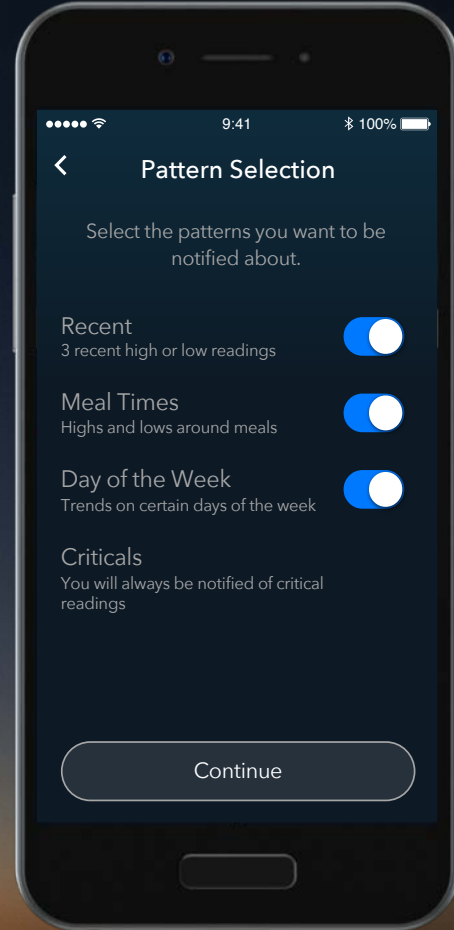


Contour™  
next ONE®  
نظام مراقبة سكر الدم

## اتجاهاتي MY PATTERNS

ستعرض جميع الاتجاهات Patterns التي تم الكشف عنها على شاشة My Patterns (اتجاهاتي)

تعرض شاشة My Patterns (اتجاهاتي) الاتجاهات التي إخترتم أن يتم إعلامكم بها. يتم تمييز الإتجاهات الغير مقروءة بدائرة بنفسجية.

.4

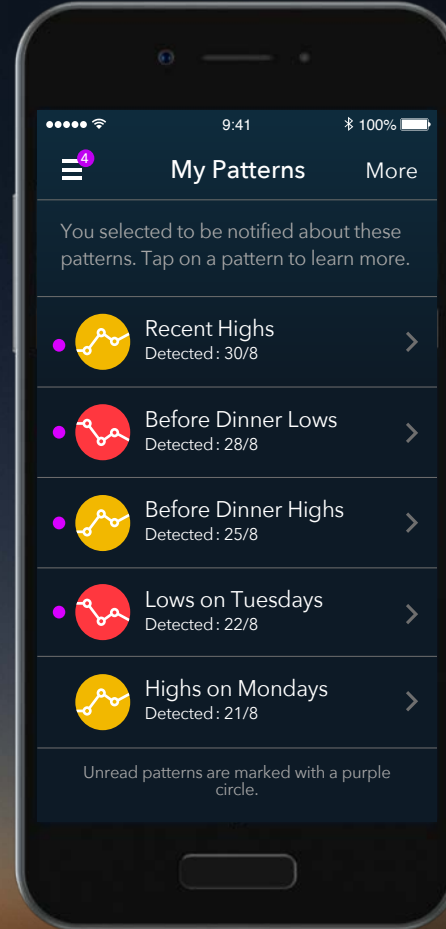

Contour<sup>TM</sup>  
next ONE<sup>®</sup>

نظام إمتداد لقيوس لدم

## اتجاهاتي MY PATTERNS

يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الاتجاهات  
pattern ومعرفة المزيد عن  
الأسباب المحتملة لذلك.

4.




Contour™  
next ONE®

نظام القياس لقياس السكر في الدم

## MY PATTERNS اتجاهاتي

يمكنكم معرفة المزيد حول ما يسبب هذه الاتجاهات والاختيار بين الأسباب المحتملة مثل النظام الغذائي أو الأدوية أو النشاط البدني.

.4

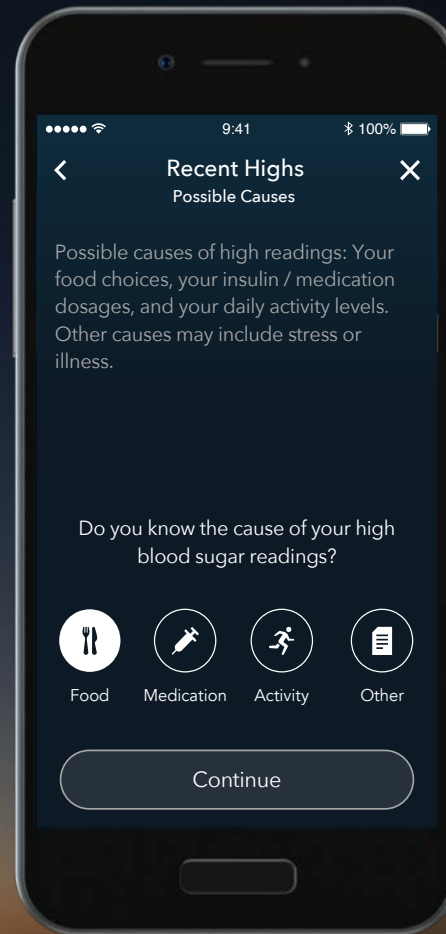


Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس سكر الدم

## MY PATTERNS اتجاهاتي

يمكنكم أيضًا تحديد تذكير مرتبط  
بالسبب المحتمل للاتجاه.

.4

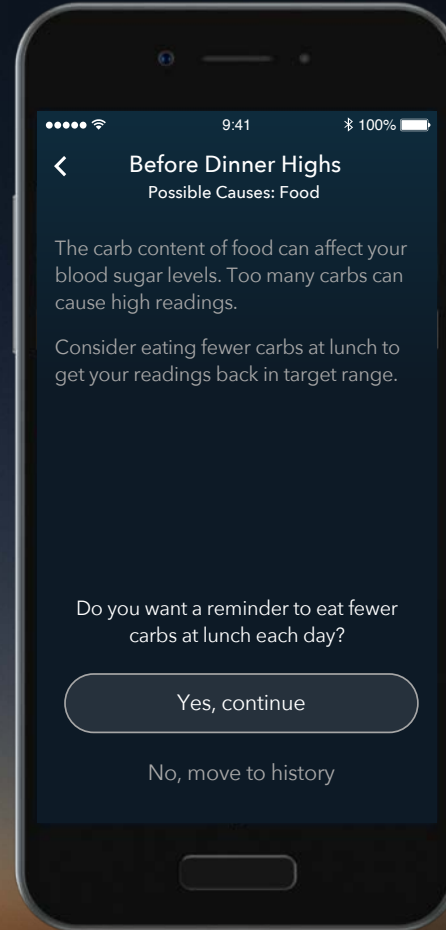


Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس السكر في الدم

## اتجاهاتي MY PATTERNS

يمكنكم الاطلاع في أي وقت على  
الاتجاهات الخاصة بكم في سجل الاتجاهات  
.patter history

5.

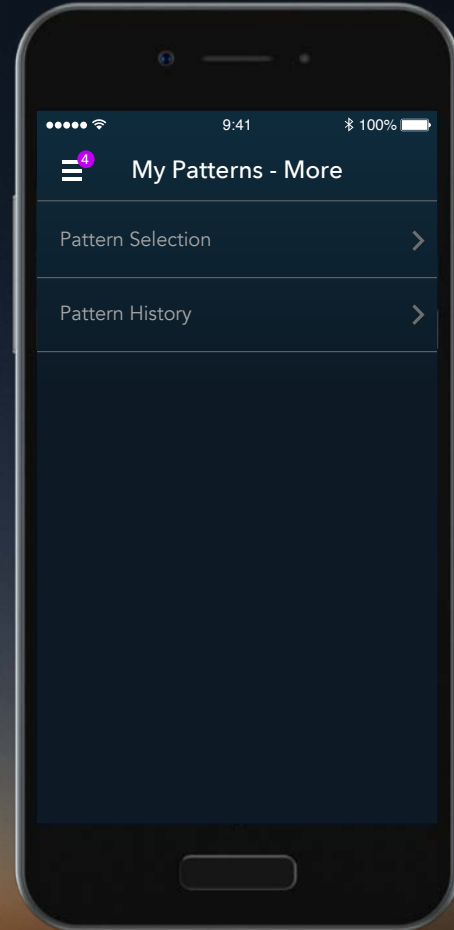


Contour™  
next ONE®  
نظام الحقن لفيوز لدم



## MY PATTERNS اتجاهاتي

في سجل الاتجاهات pattern history ،  
يمكنكم الاطلاع على الاتجاهات patterns  
التي تم الكشف عنها سابقا ولم تعد سارية .

5.

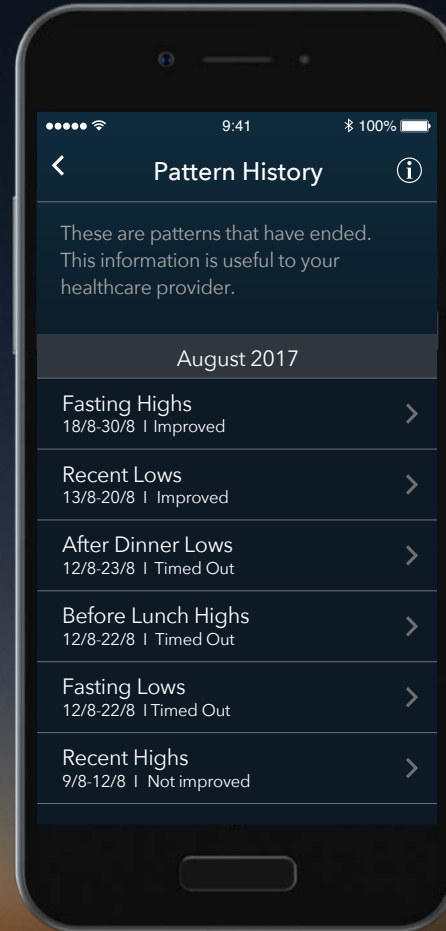


Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس سكر الدم

## اتجاهاتي MY PATTERNS

في سجل الاتجاهات pattern history ،  
يمكنكم الاطلاع على الاتجاهات patterns  
التي تم الكشف عنها سابقا ولم تعد سارية .

5.

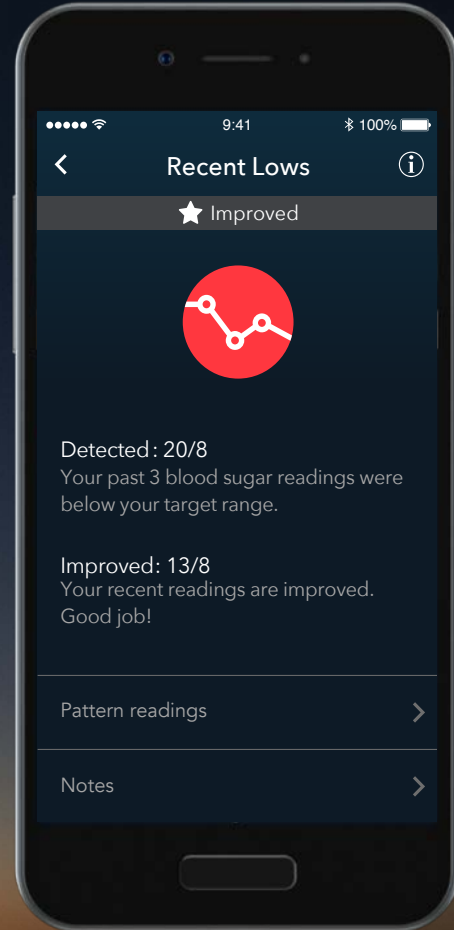

Contour™  
next ONE®  
نظام القياس لقياس السكر في الدم

diabetes.ascensia.com

إتصلوا بأخصائي الرعاية الصحية لديكم وراجعوا  
دليل المستخدم إذا كانت لديكم أسئلة حول  
جهاز قياس الجلوكوز في الدم الذك كوتتور بلص وان  
CONTOUR®NEXT ONE أو تطبيق كوتتور للسكري  
.CONTOUR™DIABETES app

للمزيد من المعلومات ولمعرفة ما إذا كانت  
هذه المنتجات متوفرة في بلدكم، قوموا  
بزيارة الموقع [diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)



بيانات مريض افتراضية لأغراض توضيحية فقط  
استشيروا دائماً أخصائي الرعاية الصحية لديكم قبل إجراء أي تغييرات في العلاج، النظام الغذائي أو ممارسة التمارين



إنّ Apple وشعار Apple وعلامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.  
إنّ App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc. . إنّ Google Play علامة تجارية لشركة Google Inc  
إنّ Ascensia، وشعار Ascensia Diabetes Care Holdings AG وCONTOUR وعلامات تجارية لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG



Contour™  
next ONE™  
نظام القياس لقياس الجلوكوز في الدم

[diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)



# Contour<sup>®</sup>

diabetes solutions