


وسيله سهله و سريعه لمشاركة نتائج جلوكوز الدم الخاصه بك مع اخصائي الرعاية الصحيه عن بعد

كن احد مستخدمي تطبيق Contour Diabetes
وقم بالتواصل مع اخصائي الرعاية الصحيه الخاص بك عن بعد *

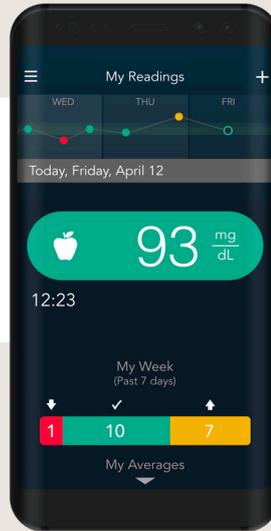

لمعرفة الأجهزة المتوافقه مع التطبيق
فضلا قم بزيارة الموقع ادناه
compatibility.contourone.com



قم بتحميل تطبيق
CONTOUR®
DIABETES

1

انشأ حسابك

2

قم بإقران جهاز
CONTOUR®

3



للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا
diabetes.ascensia.com



خطوات بسيطة يمكنك من تقييم قراءات جلوكوز الدم عن بعد مع إحصائي الرعاية الصحية الخاص بك

انتظر دعوته من إحصائي الرعاية الصحية الخاص بك
دعوه من خلال البريد الإلكتروني أو عبر دعوة QR كود

قم بمسح ال QR كود خلال زيارتك

1

إضافة مريض جديد

رمز الاستجابة السريعة يدوي



ستصل الدعوه على البريد الإلكتروني و
قم بنقر الرابط

2

إضافة مريض جديد

رمز الاستجابة السريعة يدوي

إجباري

الاسم الأول الكنية

أدخل الاسم الأول أدخل اسم الجد

بلد

السعودية

اختيارية

أريد إرسال دعوة عبر البريد الإلكتروني إلى هذا المريض

عنوان البريد الإلكتروني

أدخل عنوان البريد الإلكتروني

إضافة مريض جديد

* إحصائي الرعاية الصحية يبادر بالدعوة



Ascensia خدمة عملاء

Distributor: Batterjee National Pharmaceutical

Call Center: +800 116 6110

+966 126613091

9 a.m. - 5 p.m. / 5 days a week

Email: nassimuddin.cco@ascensia.com

قم بتسجيل الدخول بنفس الاسم المستخدم و كلمة
السر المسجله في تطبيق CONTOUR®DIABETES

3

أخصائي شخصي

لتسجيل الدخول إلى حسابك ، استخدم بيانات اعتماد Contour Cloud

عنوان البريد الإلكتروني

أدخل عنوان البريد الإلكتروني

كلمة السر نسيت رقمك السري؟

أدخل كلمة السر

تذكرني

ليس لديك حساب؟ سجل

تسجيل الدخول

املاً البيانات

3

الآن أصبحت بيانات الجلوكوز في الدم متاحة
للإحصائي الرعاية الصحية الخاص بك من خلال
GlucoContro.online

